

ROLLATORSCHIRM 99 2.0




Bitte diese Montageanleitung mit Sicherheitshinweisen unbedingt vor Montage lesen und beachten!
Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Verpackungstüte von Säuglingen und Kleinkindern fern!
Nicht für Delta-Gehräder geeignet!

Vielen Dank für den Kauf Ihres MPB-Rollatorschirms aus Bielefeld, der Sie optimal vor Regen und Sonne schützt. Mit unserem Kloben 99 können die MPB-Rollatorschirme an jedem gängigen Rollator oder auch Rollstuhl an senkrechten oder waagerechten Rohren montiert werden.

Inhalt der Verpackung:



Rollatorschirm mit 2 Verstellgelenken und Hülle

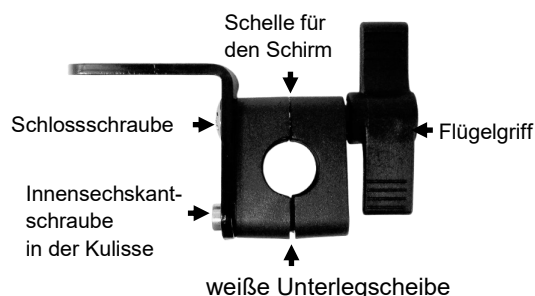

Vormontierte Halterung



Befestigungsschellen (mit Größenkennzeichnung)

Schrauben und Muttern (je 2 Stück)

Montage:

Die Halterung ist so vormontiert, dass Sie sie an das leicht schräge rechte Griffrohr von gängigen Rollatoren montieren können. Für die Montage an das Griffrohr müssen Sie aus den mitgelieferten Schellen und Schrauben des Zubehörbeutels die passenden herausuchen. Im Folgenden finden Sie typische Beispiele:



Standard-Rollatoren mit rundem Griffrohr mit Durchmesser 22 bzw. 25 mm:

Sie wählen **Schelle 22** bzw. **Schelle 25** und die **Schrauben 6x35**. Beispiele für Rollatoren mit 25 mm Rundrohr sind Dietz Taima, Drive Torro, Fabacare Silva, Rehasense Stylus und Russka Elan.



Rollatoren mit dreieckigem Rohr (z.B. Rehasense Athlon, Rehasense Server, Russka Vital und gleichartige): Sie wählen für die spitze Seite eine halbe **Schelle Mu** und für die breite Seite eine halbe **Schelle 20** und die **Schrauben 6x60** aus.



Rollatoren mit Ovalrohren wie Topro Troja, Handicare Gemino und gleichartige: Sie wählen für die schmale Seite eine halbe **Schelle Mu** und für die breite Seite eine halbe **Schelle 20** und die **Schrauben 6x45** aus.



Rollatoren mit großprofiligen Ovalrohren (ca. 48x 22 mm, z.B. B+B Alevo, B+B Capero und gleichartige): Sie wählen die **Schelle 20** oder **Mu** und die **Schrauben 6x60** oder **6x75** aus.



Rollatoren mit kleineren Ovalrohren (ca 20 x 30 mm): Sie wählen die **Schelle 20** und die **Schrauben 6x45** aus.

Für andere Rohrtypen probieren Sie bitte Schellen und Schrauben aus, indem Sie sie an das Griffrohr halten!

Beispiel Montage rundes Rohr



Beispiel Montage ovales Rohr



Sie legen die ausgewählten Schellen um das Griffrohr herum und befestigen die ausgewählten Schrauben mit dem beigelegten Sechskantschlüssel in dem schwarzen Metallwinkel. Dabei sollte die Halterung so weit wie möglich oben montiert werden, unterhalb des Bremsgriffs. Die Schrauben sollten 2 mm herauschauen. Sollten die Schrauben zu weit herauschauen, können Sie die Sicherungsmuttern nutzen, die Sie im Zubehörbeutel finden. Ziehen Sie die Schrauben nach 2 Tagen nach. Sie finden 2 schwarze Röhrchen in dem Zubehörbeutel (ohne Abbildung). Wenn die Schrauben zwischen den Halbschellen sichtbar sind (z.B. bei Ovalrohren), können Sie die schwarzen Röhrchen seitlich aufschlitzen und um die Schrauben herumlegen.


Wenn Sie den Schirm jetzt versuchsweise in die Halterung stecken und bemerken, dass dieser schief steht, können Sie mithilfe der Kulisse den Winkel verstellen (siehe Abschnitt Sonderfälle).

ROLLATORSCHIRM 99 2.0

Sonderfälle:

In einigen Fällen müssen Sie die vormontierte Halterung verändern. Dazu müssen Sie die **Innensechskantschraube** in der Kulisse versetzen. Sie sollten die **weiße Unterlegscheibe** zwischen den Schellen lassen, damit Sie den Schirm leichter einstecken können. Für die waagerechte Montage müssen Sie auch die **Schlossschraube** versetzen.


1. Der Schirm ist rechts montiert und steht schief. Versuchen Sie Kulissenloch 2 oder 4 zu nehmen.
2. Sie wollen den Schirm links montieren. Probieren Sie Kulissenloch 5 und wenn der Schirm schief steht 4 oder 6.
3. Sie wollen den Schirm an ein waagerechtes Rohr montieren (z.B. dem Schiebegriff eines Rollstuhls oder bei bestimmten Rollatoren wie Rebotec Polo): Schrauben Sie die vormontierte Halterung auf, versetzen Sie die Schlossschraube und die Innensechskantschraube in Loch 1 und 7 wie gezeigt.

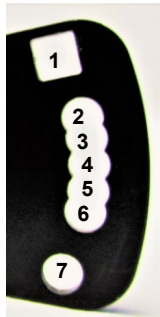

Kulisse zum Einstellen verschiedener Winkel

- Loch 1 + 7: Halterung wird an waagerechte Rohre montiert.
- Loch 2 o. 3: Halterung wird rechts an leicht schräge Rohre montiert
- Loch 4: Halterung wird an senkrechte Rohre montiert
- Loch 5 o. 6: Halterung wird links an leicht schräge Rohre montiert

Waagerechte Montage

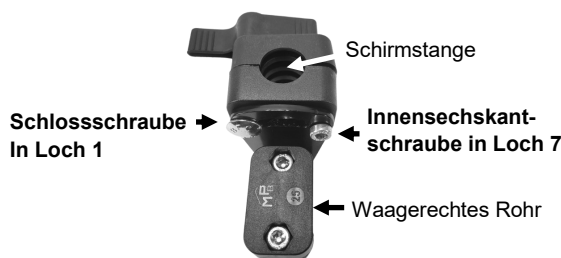

Nach der Montage und dem Einstecken des Schirms können Sie durch Versetzen des **Verstellrings** die von Ihnen gewünschte Höhe einstellen und den Schirm sichern. Entfernen Sie nun die Schutzhülle. Bringen Sie Ihren Schirm durch Drücken des grauen Knopfes an den **Verstellgelenken** in die gewünschte Position. Durch Festziehen des Flügelgriffs sichern Sie Ihren Schirm einfach gegen Verdrehen.

Öffnen Sie die Klettgurte der Schirmbespannung und drücken Sie den Öffnungsknopf des Schirmes. Der Schirm öffnet sehr schnell – bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

Wenn Sie den Schirm nicht mehr benötigen, rollen Sie den zwischenzeitig getrockneten Schirm wieder ein und verfahren Sie ansonsten in umgekehrter Reihenfolge.

SICHERHEITSHINWEISE:

Der Schirm muss so angebracht werden, dass der Faltmechanismus des Rollators oder Rollstuhls und die Funktion wichtiger Teile (z.B. Bremsen) nicht eingeschränkt werden.

Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren.

Der Schirm öffnet sich sehr schnell automatisch auf Knopfdruck. Halten Sie ihn vom Körper entfernt und achten Sie auf andere Personen in der Nähe, um Verletzungen zu vermeiden.

Beim Öffnen und bei geöffnetem Schirm besteht Verletzungsgefahr anderer durch die äußeren Schirmspitzen an den Enden der Schirmbespannung. Beim Einklappen des Schirmes und des Halters in umgekehrter Reihenfolge besteht konstruktionsbedingt Klemmgefahr für die Finger in den Knickgelenken.

Mit einem Rollatorschirm nehmen Sie mehr Raum ein. Beachten Sie bei geöffnetem Schirm, dass Sie mit diesem seitlich rechts und links hängen bleiben können. Achten Sie auch auf die Gesamthöhe, damit Sie nicht z.B. mit ausgefahrenen Markisen kollidieren. Vor dem Einfahren in Gebäude ist der Schirm zu schließen und herunterzuklappen.

Jeder Schirm bietet dem Wind Angriffsfläche. Benutzen Sie daher den aufgespannten Schirm auf keinen Fall bei Wind und Böen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie der aufgespannte Schirm beim Fahren mit dem Rollator bzw. Rollstuhl negativ beeinflusst, so klappen Sie den Schirm sofort wieder ein, um Unfälle zu vermeiden.

Klappen Sie den Schirm bei Nichtgebrauch ein. Sichern Sie die hochwertige, trockene Stoffbespannung des Schirmes durch Eindrehen und Schließen des Klettverschluss-Bandes und Nutzung der Schirmhülle. Achten Sie darauf, dass der Schirm nicht an Gegenständen und Hindernissen schleifen kann.

Achten Sie bei der Benutzung stets auf ein gut einsehbares, freies Sichtfeld. Behindern Sie andere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer nicht. Bevor Sie den Schirm zum ersten Mal bei Regen benutzen, üben Sie bitte das Öffnen und Schließen mehrfach. Rollen Sie nur vollständig getrocknete Schirme ein und ziehen dann die Schirmhülle über, da es ansonsten zu Stockflecken und/oder Verfärbungen der Bespannung kommen kann.

Vermeiden Sie den Kontakt des Schirms zu Gefahrenquellen wie Sträuchern, Hecken, Zäunen etc., da die Schirmbespannung dadurch beschädigt werden kann.

Vermeiden Sie jeglichen Scheuerkontakt, auch an Halterungsschraube, Griff der Höhenverstellung, Rollatorrahmen und Rädern.

Dieser Artikel darf in defektem Zustand nicht mehr eingesetzt werden. Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-MPB-Ersatzteilen durch einen Fachmann vorgenommen werden. Bei nicht mit uns abgestimmten Veränderungen am Produkt erlischt das Recht auf Gewährleistung!