


# Montage ROLLATORSCHIRM und Halterung ST 22 an 22 mm Rundrohr-Rollatoren und -Rollstühle

Montieren Sie die Halterung bitte so hoch wie möglich direkt unterhalb des Bremsgriffs!


Stopfen bis zur endgültigen Montage **nicht** entfernen.

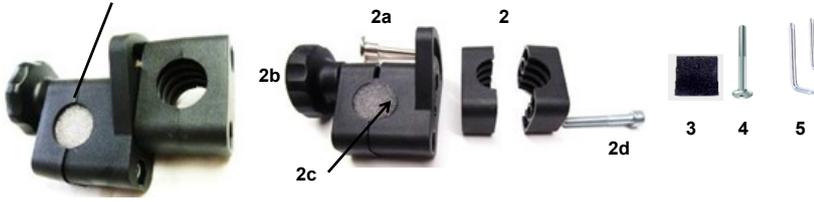

### Halterung und Befestigungsmaterial:


- 1 – Befestigungskloben fertig montiert für Standard-Rollatoren mit 22 mm Rohrdurchmesser
- 2 – Schelle 22 mm
- 2a – Flachkopfschraube M6 x 45 mm
- 2b – Handrad mit Mutter
- 2c – Sicherungsmutter
- 2d – Schraube M6 x 40 mm
- 3 – Gummischeibe
- 4 – Zusätzliche Flachkopfschraube für waagerechte Montage
- 5 – Sechskantschlüssel SW5 und SW4

### Senkrechte Montage der Halterung an Standard-Rollatoren mit 22 mm Rohrdurchmesser:

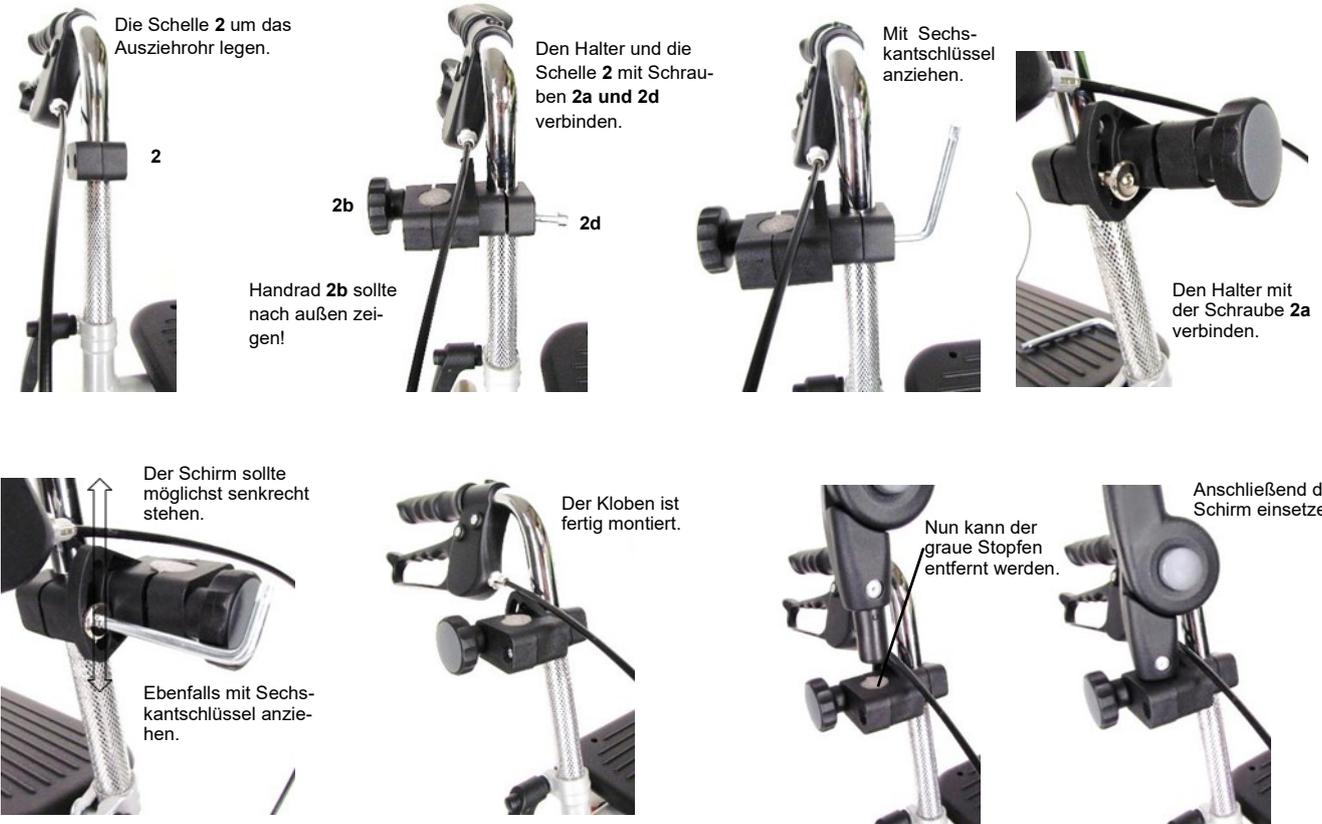

### Waagerechte Montage der Halterung an Rollstühlen und Rollatoren mit Rohrdurchmesser 22 mm:

Für eine waagerechte Montage nutzen Sie bitte die zusätzliche Flachkopfschraube (4), sowie die zwei im Kloben vorhandenen Sicherungsmuttern und montieren die Halterung wie unten gezeigt. Die Gummipatte (3) legen Sie zwischen Schelle und Rohr, um ein Verrutschen des Klobens zu vermeiden.

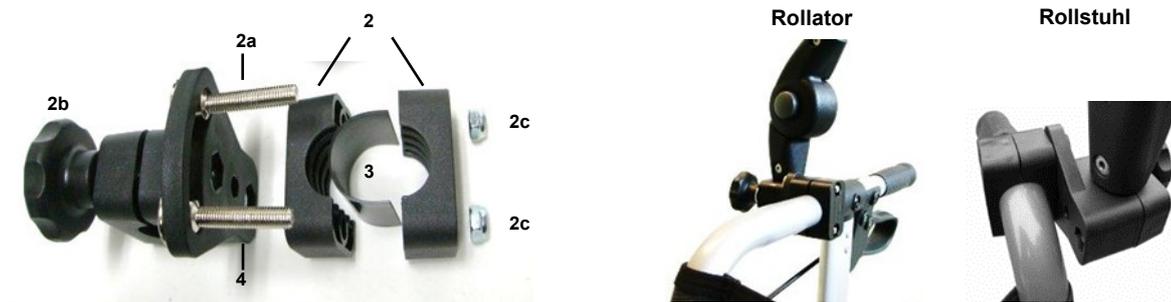

# Bedienung ROLLATORSCHIRM ST 22

Eine Videoanleitung finden Sie auch unter [www.youtube.com](http://www.youtube.com) unter dem Stichwort: „MPB Rollatorschirm“!



1. Stecken Sie den Schirm in die Halterung.
2. Vor Nutzung des Schirmes drücken Sie zunächst den grauen Knopf an der Winkelverstellung (**A**) und schwenken Sie den Schirm zum Öffnen seitlich aus. Richten Sie den Schirm durch Drücken des zweiten Verstellknopfes (**B**) auf.
3. Durch Drücken der grauen Verstellknöpfe (**A und B**) an den Knickgelenken können Sie den Schirm in verschiedene Positionen bringen (**Abb. 2**). Durch leichte Drehung des Einsteckzapfens in der Klemmeinheit kann die Position des Schirmes zusätzlich verändert werden. Lösen Sie dazu das Handrad und drehen es nach dem Verstellen wieder fest. Im optimalen Fall sollte die Schirmstange direkt rechts oder links neben Ihrem Gesicht verlaufen (**Abb. 3**).
4. Möchten Sie den Schirm einklappen, so verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

## SICHERHEITSHINWEISE:

Der Schirm muss so angebracht werden, dass der **Faltmechanismus des Rollators oder Rollstuhles** und die **Funktion wichtiger Teile** wie zum Beispiel der **Bremsen** nicht eingeschränkt werden.

Aus Sicherheitsgründen sind die **Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren**.

Der Schirm öffnet sich sehr schnell automatisch auf Knopfdruck. Halten Sie ihn vom Körper entfernt und achten Sie auf andere Personen in der Nähe, um Verletzungen zu vermeiden.

Beim Öffnen und bei geöffnetem Schirm besteht **Verletzungsgefahr** anderer durch die äußeren Schirmspitzen an den Enden der Schirmbespannung. Beim Einklappen des Schirmes und des Halters in umgekehrter Reihenfolge besteht konstruktionsbedingt **Klemmgefahr** für die Finger in den Knickgelenken.

Mit einem Rollatorschirm nehmen Sie mehr Raum ein, auch dann, wenn der Schirm ausgeklappt, aber nicht geöffnet ist. Beachten Sie bei geöffnetem Schirm, dass Sie mit diesem seitlich rechts und links hängen bleiben können. Achten Sie auch auf die Gesamthöhe, damit Sie nicht z.B. mit ausgefahrenen Markisen kollidieren. Vor dem Einfahren in Gebäude ist der Schirm zu schließen und herunterzuklappen.

Jeder Schirm bietet dem Wind eine enorme Angriffsfläche. Benutzen Sie daher den aufgespannten Rollatorschirm bzw. Rollstuhlschirm auf keinen Fall bei Wind und Böen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie der aufgespannte Schirm beim Fahren mit dem Rollator bzw. Rollstuhl negativ beeinflusst, so klappen Sie den Schirm sofort wieder ein, um Unfälle zu vermeiden.

Klappen Sie den Schirm bei Nichtgebrauch ein. Sichern Sie die hochwertige, trockene Stoffbespannung des Schirmes durch Eindrehen und Schließen des Klettverschluss-Bandes und Nutzung der Schirmhülle.

Achten Sie bei der Benutzung stets auf ein gut einsehbares, freies Sichtfeld. Behindern Sie andere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer nicht. Bevor Sie den Schirm zum ersten Mal bei Regen benutzen, üben Sie bitte das Öffnen und Schließen mehrfach in „Trockenübungen“. Rollen Sie nur vollständig getrocknete Schirme ein und ziehen dann die Schirmhülle über, da es ansonsten zu Stockflecken und/oder Verfärbungen der Bespannung kommen kann.

Vermeiden Sie den Kontakt des Schirms zu Gefahrenquellen wie Sträuchern, Hecken, Zäunen, Zigaretteglut etc., da die Schirmbespannung dadurch beschädigt werden kann.

Vermeiden Sie jeglichen Scheuerkontakt, auch an Halterungsschraube, Griff der Höhenverstellung, Rollatorrahmen und Rädern. Für silberbeschichtete Schirme ist die Schirmhülle enorm wichtig, da die silberne Beschichtung empfindlich auf mechanische Einwirkung wie Scheuern, Schleifen etc. reagiert.

Dieser Artikel darf in defektem Zustand nicht mehr eingesetzt werden. Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil jedes MPB-Rollatorschirms und muss aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist diese Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.