

Montageanleitung für FALTSPERRE EASY

Abb. 1

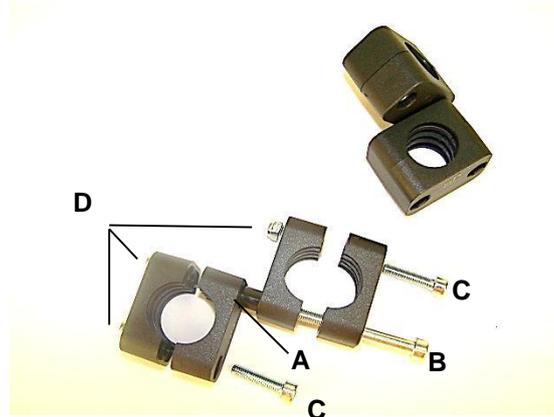


Abb. 2



Abb. 3

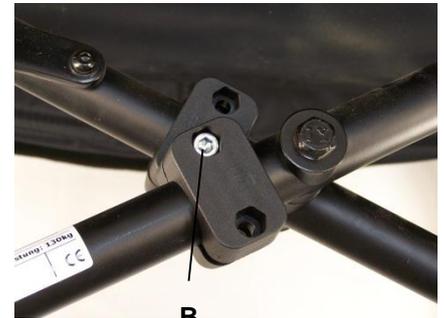


Abb. 4

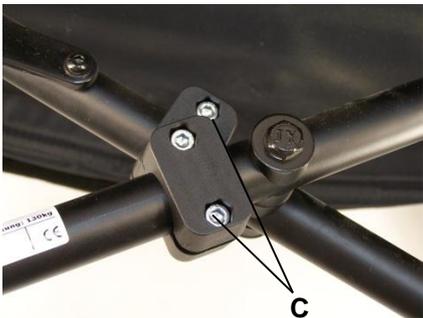


Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7

Diese Faltsperrre für den Rollstuhl erhalten Sie bereits fertig vormontiert.

Zur Montage lösen Sie die Schrauben, nehmen die 2 Halbschellen, die mit einem kleinen schwarzen Röhrchen (**Abb. 1 A**) verbunden sind und setzen Sie gegenseitig zusammen. Anschließend fügen Sie diese Schellen ins Kreuzrohr des Rollstuhls ein (**Abb. 2**) und setzen die Gegenstücke der Schellen auf (**Abb. 3**).

Zum Verschrauben beginnen Sie mit der langen, mittleren Schraube (**Abb. 1 + 4 B**) und ziehen diese leicht an. Achten Sie dabei darauf, dass die Sicherungsmutter (**D**) richtig in der unteren Schelle eingesetzt ist. Fahren Sie dann mit den beiden kürzeren Schrauben (**Abb. 1 + 5 C**) fort. Zum Schluss ziehen Sie alle Schrauben fest an.

Verfahren Sie mit der 2. Sperrre ebenso (**Abb. 6 + 7**).

Der Rollstuhl kann nun nicht mehr zusammengeklappt werden.

 Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann, bzw. Kundendienst vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil jeder **MPB © FALTSPERRE EASY** und muss daher aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist die Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten