



## Gebrauchsanweisung

### Fussfix



#### **1. Allgemeine Produktinformationen**

Bezeichnung:	FUSSFIX S
Artikelnummern:	106300
Passend für:	Längen von 115 bis 190 mm
Lieferumfang:	2 Stück

Diese stabile und bequeme Fussfixierung mit angenehmer Polsterung aus Jersey-Stoff und PU-Schaum ist versehen mit strapazierfähigen Gurten. Der Fuß kann durch den Klettverschluss und die Verstell schnalle optimal und stufenlos fixiert werden.

#### **2. Zweckbestimmung/Einsatzbereich**

FUSSFIX ist für die Fixierung des Fußes am Rollstuhl gedacht. Wenn Patienten ihren Fuß nicht mehr sicher auf dem Fußbrett halten können, ist ein Herunterrutschen des Fußes möglich, wodurch Verletzungsgefahr durch Schleifen am Boden, Einklemmung in Rollstuhlteilen o.ä. besteht. Der Artikel FUSSFIX darf nicht zur Fixierung anderer Körperteile genutzt werden. Die Fußfixierung wird üblicherweise in Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhäusern und im Altenpflegebereich eingesetzt. Bitte verwenden Sie die Fußfixierung nicht für die Sicherung des Patienten beim Transport mit dem Auto.

#### **3. Sicherheitshinweise**

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich und befolgen Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Überprüfen Sie die Fußfixierung vor der Benutzung auf Beschädigungen. Ein beschädigter Artikel darf nicht mehr eingesetzt werden und muss unverzüglich ausgetauscht werden. Achten Sie besonders darauf, ob Halteelemente verschlissen sind. Vermeiden Sie den Einsatz von spitzen Gegenständen, da diese die Fußfixierung beschädigen könnten. Achten Sie auf scharfe Kanten bei der Befestigung der Fußfixierung am Rollstuhl, um ein Verschleiß der Halteelemente zu vermeiden.
- Die Fußfixierung muss durch geeignetes Befestigungsmaterial mit der Fußplatte oder dem Fußbrett des Rollstuhls verbunden werden. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte kontaktieren Sie zu geeigneten Befestigungspunkten auch den Hersteller Ihres Rollstuhls. Lassen Sie die Befestigung durch Fachpersonal vornehmen.



# Gebrauchsanweisung

- Haltegurte müssen körpernah anliegen. Bitte achten Sie auf die Sitzgenauigkeit der Gurte. Nicht korrekt sitzende Gurte sind eine ernste Gefahr und können zu Unfällen wie z.B. Strangulationen führen!
- Achten Sie darauf, dass die Fußfixierung die richtige Größe hat. Eine zu lockere Fußfixierung hält den Fuß nicht, eine zu enge Fixierung schnürt den Fuß ein. Schließen Sie die Klettverschlüsse korrekt, damit die Fußfixierung sicher und stabil sitzt. Kontrollieren Sie bitte, dass Gurte und Verschlüsse nicht verdreht sind.
- Achten Sie bitte darauf, dass es nicht zum Faltenwurf durch die Kleidung des Patienten kommt, um Druckstellen zu vermeiden. Wir empfehlen die Nutzung der Fußfixierung mit Socken. Bei Nutzung auf nackter Haut kontrollieren Sie bitte, dass keine Scheuerstellen entstehen.
- Klettverschlüsse können die Kleidung beschädigen. Bitte achten Sie darauf, dass diese nicht an Kleidungsstücken angebracht werden, sondern an der Fußfixierung.
- Halten Sie die Fußfixierung beim Fahren des Rollstuhls stets geschlossen. Lose herabhängende Gurte und Klettverschlüsse können Unfälle verursachen. Kürzen Sie die Gurte auf die passende Länge.
- Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Fixierung von Patienten. Dies ist insbesondere wichtig bei Patienten, die die Fußfixierung nicht selbständig öffnen können.
- Wir empfehlen, die Fußfixierung nur unter Aufsicht einer weiteren Person einzusetzen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Patienten mutwillig die Fußfixierung selbständig öffnen. Der Fuß wird dann nicht mehr sicher gehalten, wodurch Verletzungsgefahr besteht.
- Benutzen Sie die Fußfixierung nicht beim Transport im Auto, da sie keinen Sicherheitsgurt ersetzen kann.
- Die Fußfixierung dient ausschließlich der Sicherung des Fußes. Andere Körperteile müssen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Haltegurte für das Becken oder den Oberkörper) gesichert werden. Fragen Sie unbedingt den Arzt, ob die Fußfixierung eine geeignete Maßnahme für den Patienten ist.

## **4. Montage**

1. Befestigen Sie die Fußfixierung an geeigneter Stelle des Fußbretts bzw. der Fußplatte.
2. Legen Sie nun die Fußfixierung um den Knöchel des Patienten und schließen Sie den Klettverschluss.
3. Kürzen Sie zu lange Gurte auf die passende Länge, damit diese nicht herunterhängen.

## **5. Reinigung, Pflege und Lagerung**

Die Fußfixierung ist waschbar (Handwäsche). Waschvorgänge können mit der Zeit die Klettbänder beeinträchtigen, was sich negativ auf die Lebensdauer des Produktes auswirkt. Lagern Sie die Fußfixierung in geschlossenen Räumen bei normaler Umgebungstemperatur und setzen Sie sie nicht dauerhaft direkter Sonneneinstrahlung aus. Überprüfen Sie, wie in den Sicherheitshinweisen angegeben, das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Ein beschädigtes Produkt darf nicht mehr verwendet werden. Die konkrete Lebensdauer des Produkts hängt sehr stark davon ab, welchen Einflüssen dieses im Laufe der Zeit ausgesetzt ist. Luftfeuchtigkeit, langfristige Sonneneinstrahlung, chemische Substanzen, unachtsamer Umgang können sich negativ auf die Lebensdauer auswirken. Auch bei äußerlicher Unversehrtheit empfehlen wir den Austausch der Fußfixierung nach spätestens 3 Jahren Gebrauch.

## **6. Technische Daten**

FUSSFIX S:	Gewicht ca. 0,106 kg
Farbe:	schwarz
Material:	Polsterung: Stoff Jersey, Füllung PU-Schaum
	Verstellschnallen: Kunststoff (POM)
	Gurte: Polypropylen

## **7. Entsorgung**

Bitte entsorgen Sie die Fußfixierung im Hausmüll.

Die Gewährleistung für dieses Produkt auf Material- und Verarbeitungsfehler beträgt in Verbindung mit dem Kauf-/Lieferbeleg 12 Monate. **Schäden durch unsachgemäße Behandlung sind hiervon ausgenommen.** Diese Anleitung ist Bestandteil einer jeden MPB-Fußfixierung und muss daher aufbewahrt werden. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.

**Als Zubehör zu einem Medizinprodukt der Klasse I trägt dieses Produkt eine CE Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745. Es entspricht daher allen auf das Produkt anzuwendenden regulatorischen Anforderungen. Bitte melden Sie im Zusammenhang mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle umgehend uns und den zuständigen Behörden.**