



Rollstuhlzubehör

Unser Ideen helfen im Alltag

und mehr...

Gebrauchsanweisung

WEICHSITZ CE





Gebrauchsanweisung

1. Allgemeine Produktinformationen:

Bezeichnung:	WEICHSITZ
Artikelnummer:	300400
Passend für Toilettenstühle der Marken:	Bischoff & Bischoff, Behrend, Dietz, Drive, Invacare, RFM-Rehaforum, Russka, Servoprax, Trendmobil u.a. Toilettenstühle, auf denen der Sitz sicher aufliegt

Der Weichsitz wird auf den bereits vorhandenen Toilettenstuhlsitz aufgelegt.

2. Zweckbestimmung/Einsatzbereich:

Toilettenstühle erleichtern Personen mit Bewegungseinschränkungen den Toilettengang. Herkömmliche Toilettenstuhlsitze sind zumeist aus hartem Kunststoff. Der Weichsitz dagegen besteht aus mittelweichem PU-Schaum und bietet somit einen erhöhten Sitzkomfort. Auch Patienten mit Neigung zu Druckgeschwüren profitieren von der weicheren Auflage. Der Weichsitz kann sowohl zu Hause, als auch in Altenheimen, Rehabilitationseinrichtungen und Krankenhäusern zum Einsatz kommen.

3. Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich und befolgen Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Fragen Sie den Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal, ob der Weichsitz eine für Sie geeignete Sitzauflage ist. Das Material des Weichsitzes ist gut verträglich. In extrem seltenen Fällen kann es bei sensiblen Personen durch Polyurethan zu Hautreaktionen kommen. Bitte sprechen Sie unbedingt Ihren Arzt an, wenn Sie ungewöhnliche Hautreaktionen bemerken.
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz des Weichsitzes auf dem Toilettenstuhlsitz. Durch das Design des Weichsitzes ist keine Montage mit Schrauben oder Bändern nötig. Der Weichsitz kann bei richtigem Sitz weder zur Seite noch nach vorne oder hinten wegrutschen, sondern sitzt stabil auf der Toilettenstuhlöffnung auf, die sich dadurch aber verkleinert.
- Überprüfen Sie den Weichsitz regelmäßig auf Beschädigungen. Ein beschädigter Weichsitz darf nicht mehr eingesetzt werden. Beschädigungen der Außenhaut können zum Eindringen von Flüssigkeiten und zum Aufquellen des Kerns führen.
- Beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheitshinweise des Herstellers des Toilettenstuhls.
- Halten Sie den Weichsitz von Zündquellen wie Kerzen und brennenden Zigaretten fern.
- Bitte setzen Sie einen verschmutzten Weichsitz aus Hygienegründen nicht ein. Beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise.

4. Hinweise zur Nutzung:

Der Weichsitz kann ohne Schrauben oder Fixierbänder montiert werden. Er wird auf den vorhandenen Toilettenstuhlsitz aufgelegt und sitzt damit stabil auf. Ein Verrutschen nach vorne oder zur Seite ist nicht möglich.

5. Reinigung, Pflege und Lagerung:

Die Reinigung des Weichsitzes kann mit einem feuchten Tuch oder Schwamm mit milder Seifenlauge erfolgen. Setzen Sie zur Reinigung keinerlei aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel und auch keine Scheuerschwämme oder Bürsten ein. Verwenden Sie kein heißes Wasser, keine Dampfreiniger, keine konzentrierten Säuren und Laugen. Verwenden Sie zur Desinfektion keine Ethanol- bzw. Isopropanol-haltigen Mittel, da es dadurch zu Abfärbungen kommen kann. Wir empfehlen ein alkoholfreies Desinfektionsmittel (z.B. Mikrozid® Sensitive Liquid). Beachten Sie bitte die Herstellerangaben des Desinfektionsmittels. Setzen Sie den Weichsitz nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus, da es ansonsten zu Vergilbungen kommen kann. Lagern Sie den Weichsitz in trockener Umgebung und tauchen Sie ihn nicht dauerhaft in Flüssigkeiten ein. Das Material des Weichsitzes ist bei Beachtung der Pflegehinweise sehr lange haltbar, mindestens jedoch 2 Jahre. Luftfeuchtigkeit, langfristige Sonneneinstrahlung, chemische Substanzen und unachtsamer Umgang können sich negativ auf die Lebensdauer auswirken. Ein Wiedereinsatz ist nach einer gründlichen Reinigung und Desinfektion möglich. Wir empfehlen aus hygienischen Gründen jedoch, den Sitz nur bei einem Patienten einzusetzen.

7. Technische Daten

Außenmaß:	45 x 43 cm
Toilettenausschnitt:	Unterseite Innenmaß 18 x 20 cm, Außenmaß 22,6 x 20,6 cm
Material:	PUR-Integralschaum Dipointegral
Gewicht:	ca. 1,0 kg
Farbe:	schwarz

8. Entsorgung:

Der Weichsitz kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB-Weichsitzes und muss daher aufbewahrt werden. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.

Als Zubehör zu einem Medizinprodukt der Klasse I trägt dieses Produkt eine CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745. Es entspricht den auf das Produkt anzuwendenden regulatorischen Anforderungen. Bitte melden Sie im Zusammenhang mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle umgehend uns und den zuständigen Behörden.