
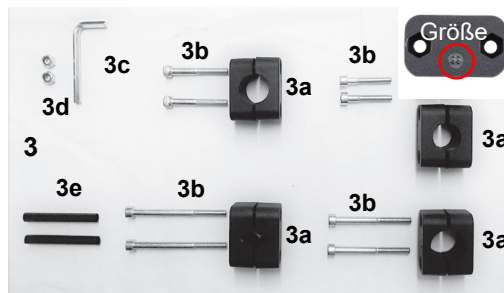
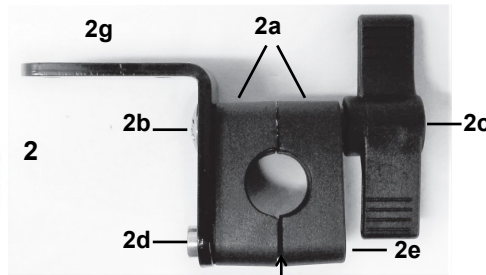


# Montageanleitung für KLAPPTISCH 99

## Inhalt:

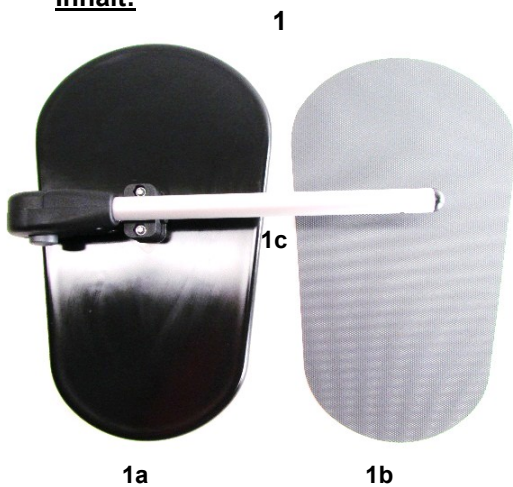

- 1 – Klappstisch mit Gestänge**  
 1a – Klappstisch  
 1b – Rutschfeste Auflage  
 1c – Zapfen
- 2 – Vormontierter Befestigungskloben**  
 2a – Schelle 20 mm  
 2b – Schlossschraube M6 x 55  
 2c – Flügelgriff mit Mutter  
 2d – Innensechskantschraube M6 x 40  
 2e – Sicherungsmutter M6  
 2f – Kunststoff-Unterlegscheibe  
 2g – Befestigungswinkel
- 3 – Zubehörbeutel**  
 3a – Schellen (20, 22, 25 mm, Multi)  
 3b – Befestigungsschrauben (M6 x 35, 45, 60 und 75)  
 3c – Einwegschlüssel SW 5  
 3d – Sicherungsmuttern M6  
 3e – Gewindeabdeckung
- Zusätzlich (ohne Abbildung)  
 – Einwegschlüssel SW 4  
 – Ersatzklebepunkte

Dieser universelle KLAPPTISCH 99 lässt sich an die meisten Rollatoren und Rollstühle montieren. Ausgenommen sind davon Rundrohre unter 20 und über 25 mm Durchmesser, Ovalrohre größer als 55 mm und eckige Rohre jeder Art. Der Klappstisch ist bereits teilweise vormontiert, so dass er sich mit wenigen Handgriffen anbringen lässt.

## Montage der Halterung:

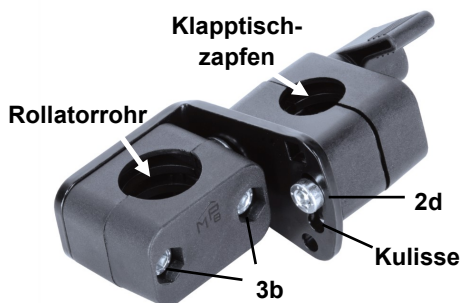


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

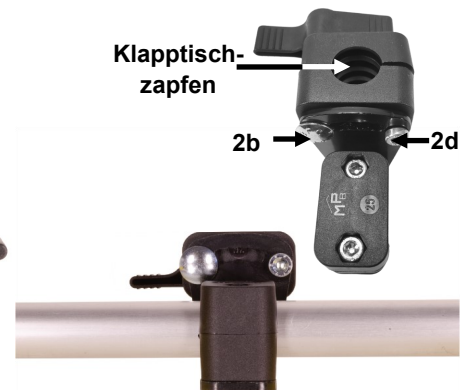


Abb. 4

- Zunächst befestigen Sie die Halterung des Klappstisches. Die Schelle auf der Seite der Flügelmutter (2c) dient der Aufnahme des Zapfens des Klappstisch-Gestänges. Die Schelle auf der anderen Seite des Klobens wählen Sie bitte je nach Durchmesser Ihres Rollator- bzw. Rollstuhlrohrs aus. Wir stellen Ihnen verschiedene Schellen (3a) zur Verfügung: je eine Schelle für runde Rohre mit 20 mm, 22 mm, und 25 mm und die Multischelle, die Sie bei verschiedenen Ovalrohren einsetzen können. Je nach Rohrbeschaffenheit können Sie auch eine Halbschelle der Multischelle mit einer Halbschelle für die Rundrohre oder verschiedene Halbschellen für Rundrohre miteinander kombinieren. Im Zubehörbeutel finden Sie Innensechskantschrauben verschiedener Längen (3b). Bitte testen Sie, welche Schraubenlänge Sie benötigen, indem Sie die passende Schelle um Ihr Rollatorrohr legen. Die passende Schraube sollte dabei gut in das Gewinde des Befestigungswinkels eingedreht werden können, aber nicht zu weit überstehen, um Verletzungsgefahr zu vermeiden. Testen Sie dies, indem Sie die Schraube neben die ausgewählte Schelle halten. Sie sollte nach der Montage ca. 2 mm herausstehen.
- Einen komplett montierten Kloben sehen Sie in **Abb.1** (zur besseren Sichtbarkeit ohne Rohr dargestellt). Legen Sie dazu die passende Schelle um das Schiebegriffrohr herum und ziehen Sie die ausgewählten Schrauben (3b) mit dem mitgelieferten Einwegschlüssel (3c) fest. Die Flügelmutter sollte nach der Montage am Rohr immer nach außen zeigen!
- Der Neigungswinkel des Klobens lässt sich verstellen, indem Sie die Schraube 2d in ein anderes Kulissenloch setzen. Der vormontierte Kloben ist für die Montage am rechten Griffrohr für Rohre mit leicht schrägem Neigungswinkel gedacht (Position X in der Kulissee, **Abb. 2**). Wenn der Klappstisch schief steht, probieren Sie die anderen Löcher der Kulissee aus, die für schrägere Rohre senkrechte Rohre oder die Montage auf der linken Rollatorseite gedacht sind. Beachten Sie die Detailansicht der Kulissee in **Abb. 2**. Für die Veränderung des Neigungswinkels des Klobens müssen Sie die Schraube 2d lösen, ein anderes Kulissenloch wählen und mithilfe der Sicherungsmutter 2e wieder festziehen. Achten Sie darauf, dass die helle Kunststoff-Unterlegscheibe 2f weiterhin zwischen den Schellenhälften sitzt. Dies erleichtert später das Einstecken des Zapfens des Klappstisches. Die äußeren Löcher der Kulissee (das obere rechteckig, das untere rund) sind für die Einstellung eines extremen Winkels (30°) geeignet, dienen aber auch der Montage an einem waagerechten Rohr. **Abb. 3** zeigt exemplarisch die Montage des Klobens an einem senkrechten und **Abb. 4** die Montage an einem waagerechten Rohr.

4. Wenn nach der Montage eine Lücke zwischen den Halbschellen am Rollatorrohr verbleibt und die Schrauben sichtbar sind, nutzen Sie bitte die Kunststoffröhrchen (3e) zur Abdeckung, indem Sie diese in die passende Länge schneiden, seitlich aufschlitzen und über die Schrauben legen. Ziehen Sie die Schrauben 2 Tage nach Erstmontage nochmals fest.

### Montage und Bedienung des Klapptisches:



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7

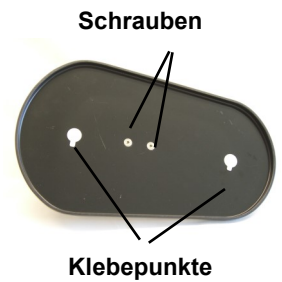


Abb. 8



Abb. 9



Abb. 10



Abb. 11



Abb. 12

1. Stecken Sie den Zapfen des Tisches in die Halterung (Abb. 5)
2. Drehen Sie den Tisch passend (Abb. 6, Abb. 7) und drehen Sie den Flügelgriff fest. Stellen Sie sicher, dass der Tisch waagrecht ist. Ziehen Sie mit dem kleineren mitgelieferten Sechskantschlüssel die Schrauben auf der Tischplatte (Abb. 8) fest. Sollte der Zapfen zu lang sein, können Sie ihn mit einer Säge kürzen. Der Tisch sollte bei festgedrehtem Flügelgriff arretiert sein, aber dennoch drehbar bleiben.
3. Befestigen Sie nun die beigelegte Antirutschmatte auf Ihrem Tisch. Nutzen Sie dazu die Klebepunkte (Abb. 8), ziehen Sie die Klebefolie ab und legen Sie die Matte mit der Noppenseite nach oben auf den Tisch. Der Tisch ist nun gebrauchsfertig.
4. Sie können den Tisch bei Nichtgebrauch bequem abklappen (Abb. 9, Abb. 10). Drücken Sie dazu den grauen Druckknopf am Knickgelenk.
5. Wenn Sie den Tisch nutzen wollen, achten Sie bitte immer darauf, dass die Tischplatte waagrecht steht, bevor Sie ihn belasten. Der Tisch kann gleichmäßig bis zu 2,5 kg belastet werden.
6. Sie können die Tischplatte in verschiedene Positionen drehen (Abb. 11, Abb. 12). Zur Veränderung der Position lösen Sie bitte leicht den Flügelgriff der Halterung, drehen den Zapfen und ziehen den Flügelgriff wieder fest.
7. Wenn Sie mit dem Rollator/dem Rollstuhl fahren, achten Sie bitte darauf, den Tisch entweder einzuklappen (Abb. 9 bzw. 10) oder innen zu positionieren (Abb. 11 bzw. 12).

### Reinigung und Wartung:

Reinigen Sie Ihren Klapptisch mit lauwarmem Wasser unter Zusatz eines neutralen Spülmittels. Nutzen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Setzen Sie zur Reinigung keinerlei aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel und auch keine Scheuerschwämme oder Bürsten ein. Verwenden Sie kein heißes Wasser, keine Dampfreiniger, keine konzentrierten Säuren und Laugen. Bei Verwendung eines Desinfektionsmittels beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers.

Lagern Sie den Klapptisch in geschlossenen Räumen und ohne direkte Sonneneinstrahlung. Prüfen Sie den Tisch regelmäßig auf Beschädigungen.



Bringen Sie den Tisch so an, dass die Funktionen der Bremsen, Klingel, Stockhalter, Lampen etc. nicht beeinträchtigt werden.



Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann, bzw. Kundendienst vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden **MPB® KLAPPTISCHs 99** und muss daher aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist die Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.