


Montageanleitung für CAM-HALTER TR oder ACTION-CAM-HALTER TR

Sicherheitshinweise - safety advice



- ⚠ Bitte diese Montage- und Gebrauchsanweisung unbedingt lesen und beachten!! Plastiktüten können gefährlich sein! Um Erstickengefahr zu vermeiden, halten Sie die Verpackungstüte von Säuglingen und Kleinkindern fern!
- ⚠ It is absolutely essential to read this manual carefully and to pay attention to the assembly- and operating instructions! Plastic bags may be hazardous! Please keep the packaging bag out of reach of babies and toddlers in order to prevent danger of

Inhalt:

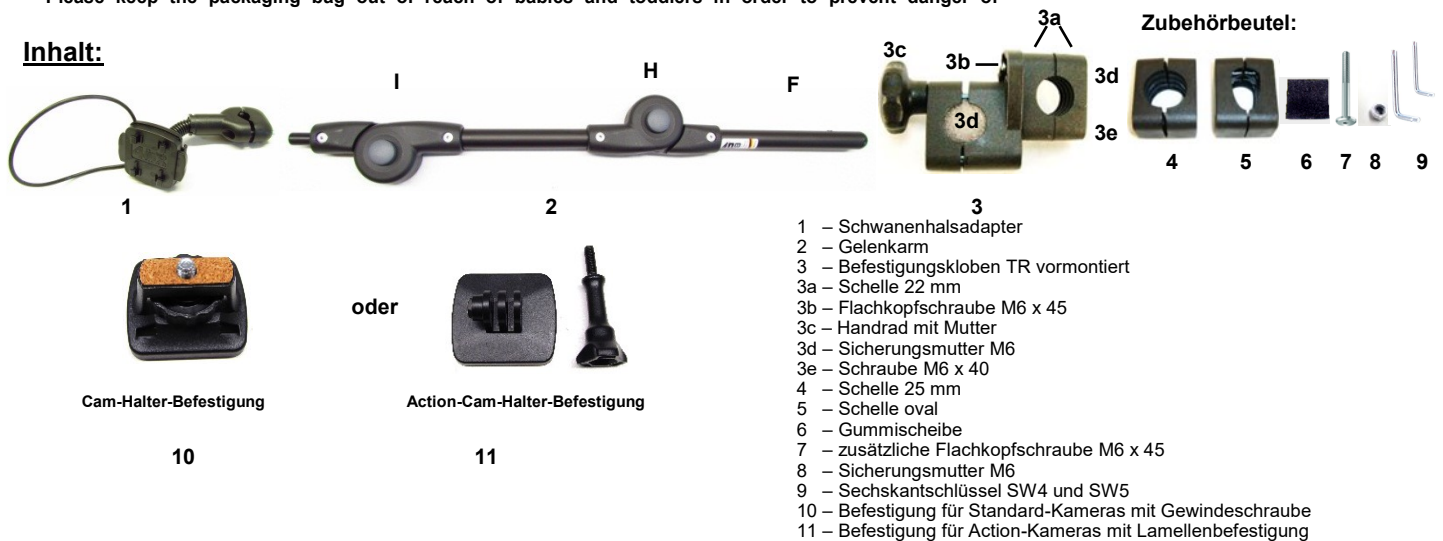


- ⚠ **Achtung:** Der Befestigungskloben muss so angebracht werden, dass Funktionen der Bremsen, Klingel, Stockhalter, Lampen etc. nicht beeinträchtigt werden.

Montage an Standard-Rollatoren mit Rohrdurchmesser 22 oder 25 mm:

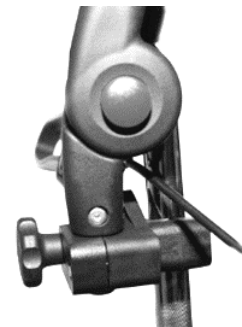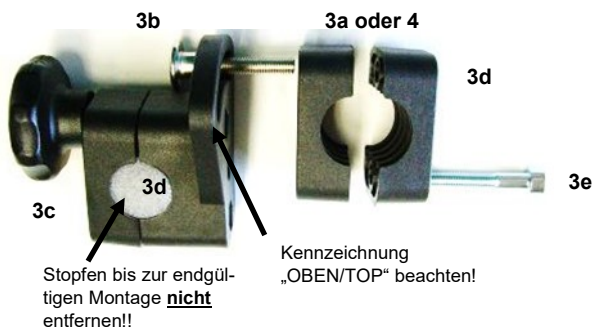

Montage so hoch wie möglich auf der angerauten Fläche!

Montage an Ovalrohren wie bei TOPRO, GEMINO und gleichartigen Ovalrohren:

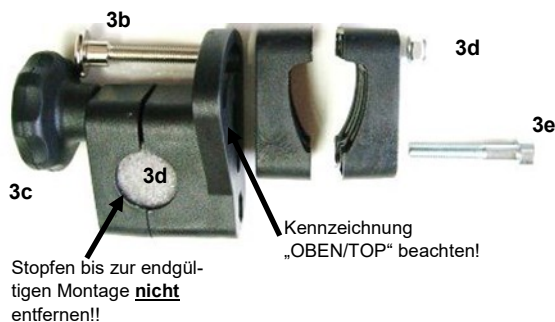


Montage so hoch wie möglich unterhalb des Bremsgriffs!

Achtung! Bei der Montage dieser Modelle kann es durch die Schraube zu einer geringfügigen, unvermeidbaren Oberflächenbeschädigung kommen, die bei montiertem Kloben nicht sichtbar ist. Verschieben Sie den Kloben im montierten Zustand nicht auf dem Rohr (Gefahr von Kratzspuren)!



Montage an Rollstühlen und Rollatoren wie Magic, Polo etc. mit Rohrdurchmesser 22 oder 25 mm:

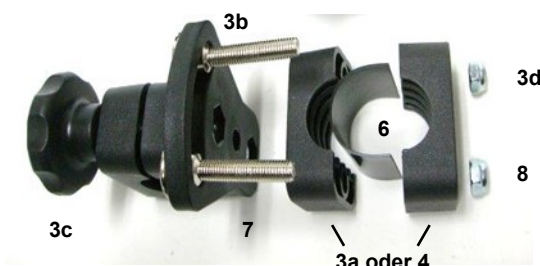

Rollator



Rollstuhl

Bevor Sie den Cam-Halter in Gebrauch nehmen, müssen Sie noch den beiliegenden Schwanenhalsadapter (1) an den Gelenkarm montieren. Lösen Sie hierfür die Schrauben mit dem Inbusschlüssel und stecken ihn auf den kleinen schwarzen Zapfen wie in **Abb. 1** gezeigt. Sie können ihn nach der Endmontage noch jederzeit passend ausrichten.

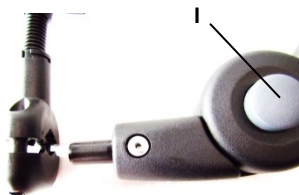


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Montage CAM-HALTER für Standard-Kameras:

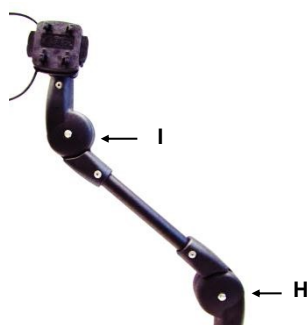


Abb. 4

Stecken Sie den Stativhalter für Standard-Kameras (10) auf den Schwanenhalsadapter (**Abb. 5**). Schrauben Sie die Kamera mit dem Handrad des Stativhalters fest wie in **Abb. 6** gezeigt.



Abb. 5



Abb. 6

Montage ACTION-CAM-HALTER für Action-Kameras:

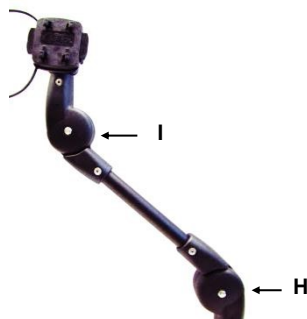


Abb. 7

Stecken Sie den Stativhalter für Action-Kameras (11) auf den Schwanenhalsadapter (**Abb. 8**). Schrauben Sie die Kamera in der Lamellenhalterung fest. Die Neigung können Sie mit Hilfe des Schwanenhalses und der Lamellenhalterung variieren.

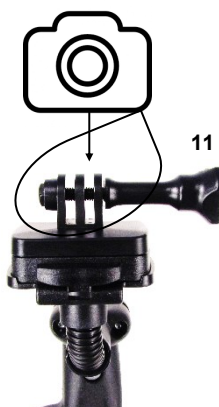


Abb. 8



Abb. 9

Durch Drücken der grauen Verriegelungsknöpfe an den Knickgelenken **H** und **I** (**Abb. 4**, **Abb. 7**) können Sie den Gelenkarm in verschiedene Positionen bringen. Durch Drehung des Einsteckzapfens kann die Position zusätzlich stufenlos verändert werden. Lösen Sie dafür das Handrad **3c** an der Halterung und drehen Sie diese nach dem Verstellen wieder fest.

- ⚠ Achten Sie stets auf Sicherung der Kamera durch Nutzung der Halteschleufe (**Abb. 5** bzw. **8**) und auf die feste Verbindung der Kamera mit dem Halter. Kontrollieren Sie den Sitz regelmäßig.
- ⚠ Setzen Sie das Produkt nicht zu hoher Sonneneinstrahlung aus. Die Funktion kann dadurch beeinflusst werden.
- ⚠ Reinigen Sie den Artikel nur mit einem weichen Tuch und etwas lauwarmem Wasser unter Zusatz eines neutralen Spülmittels.
- ⚠ Setzen Sie den Artikel im defekten Zustand nicht mehr ein. Der Austausch defekter Teile darf nur mit Originalersatzteilen durch einen Fachmann vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil jedes **MPB® CAM-HALTERs** und **ACTION-CAM HALTERs** und muss daher aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist die Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.