




Gebrauchsanweisung Gelkissen ST

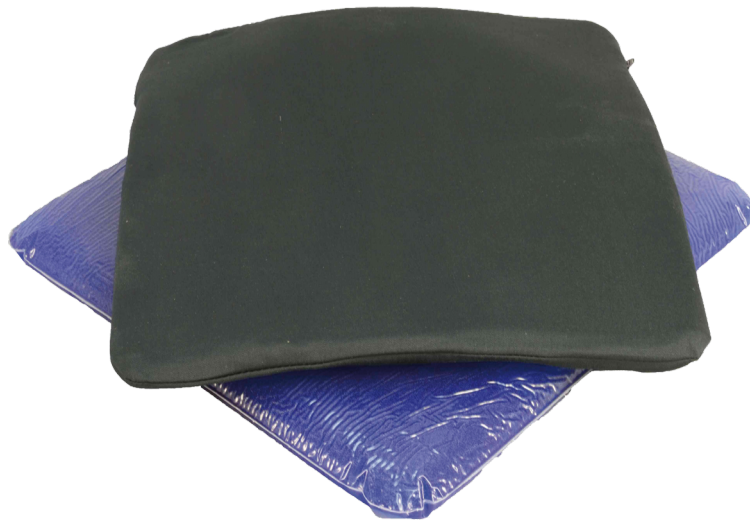

1. Allgemeine Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Bezeichnungen: | Gelkissen ST 40, 43, 45, 48, Sondermaß |
| Artikelnummern: | 117700, 117800, 117900, 118000, 118010 |
| Passend für: | Sitzfläche mit Sitzbreiten entsprechend der Kissengröße |
| Maximales Gewicht der sitzenden Person: | 90 kg |
| Mitgeliefertes Zubehör: | Anti-Rutsch-Matte |

Das Gelkissen ST setzt sich zusammen aus einem hochwertigen PU-Gelkissen und einem waschbaren Bezug, der mit einem Reißverschluss versehen ist. Eine Anti-Rutsch-Matte verhindert das Wegrutschen des Kissens.

2. Zweckbestimmung:

Das Gelkissen ST enthält ein PU-Gel in einer Polyurethanfolie. Es kann auf jede passende Sitzfläche gelegt werden und ermöglicht so ein besonders komfortables Sitzen.

3. Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich und befolgen Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Beachten Sie das zulässige maximale Gewicht des Anwenders, damit ein komfortables Sitzen ermöglicht wird.
- Überprüfen Sie das Gelkissen vor der Benutzung auf Beschädigungen. Ein beschädigtes Gelkissen darf nicht mehr eingesetzt werden. Vermeiden Sie den Einsatz von spitzen Gegenständen, da diese die Gelaußenhülle beschädigen können. Ausgetretenes Gel ist nicht gefährlich. Bei Kontakt mit der Haut sollte das Gel mit Wasser und Seife abgewaschen werden.
- Wenn Sie das Gelkissen auf einer glatten Oberfläche einsetzen, legen Sie zur Rutschhemmung bitte die mitgelieferte Anti-Rutschmatte zwischen Stuhl und Kissen. Ein ungewolltes Verrutschen des Kissens stellt ein Verletzungsrisiko dar.
- Das Kissen darf nicht geknickt oder verdreht werden. Eine Person, die Hilfe beim Hinsetzen benötigt, darf nicht auf das Kissen gezogen oder auf dem Kissen sitzend zurückgezogen werden, denn dadurch besteht Walkgefahr und eine Beulenbildung ist möglich. Beachten Sie bitte, dass ein Zurückziehen des Sitzenden auf dem Kissen durch die entstehende „Wurstbildung“ langfristig zur vollständigen Zerstörung des Kissens führt.

- Wenn der Anwender nicht über ausreichend Körperkräfte verfügt, um sich selbstständig im Stuhl oder Rollstuhl sicher zu halten, sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, die verhindern, dass der Anwender aus dem Sitz herausrutscht. Bitte besprechen Sie mit dem behandelnden Arzt in Verbindung mit z.B. dem Pflegepersonal, welche Maßnahmen zur Sicherheit des Anwenders eingesetzt werden sollen. Denkbar wären z.B. Beckengurte, Sitzhosen oder der Einsatz eines Pflegerollstuhls mit kippbarer Sitz- und Rückenfläche.
- Bitte wenden bzw. drehen Sie das Kissen täglich, um eine gleichmäßige Belastung zu gewährleisten und die Funktion des Kissens lange zu erhalten.
- Benutzen Sie das Kissen aus hygienischen Gründen nur bei einer Person und mit aufgezogener Kissenhülle.
- Beachten Sie beim Wiederaufziehen des Kissenbezugs nach dem Waschen, dass Sie die Gelkissenhülle nicht durch den Reißverschluss beschädigen, da dies das Kissen irreparabel beschädigt.
- Halten Sie das Gelkissen von Zündquellen wie Kerzen und brennenden Zigaretten fern.
- Bei Lagerungstemperaturen unterhalb der Raumtemperatur lassen Sie das Kissen bitte vor Benutzung etwas vorwärmen, damit es beim Patienten nicht zu Missempfindungen aufgrund der Kälte kommt.

4. Hinweise zur Nutzung

1. Vor der Nutzung lesen Sie sich bitte die komplette Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie unbedingt die oben stehenden Sicherheitshinweise.
2. Wählen Sie das Gelkissen passend zur Größe der Sitzfläche, die Sie verwenden wollen, aus und legen Sie es auf diese auf. Wir empfehlen in jedem Fall die Nutzung der mitgelieferten Anti-Rutschmatte.
3. Der Anwender setzt sich nun selbstständig auf das Kissen oder wird durch eine helfende Person auf das Kissen in der richtigen Position gesetzt.

5. Reinigung, Pflege und Lagerung:

Die Reinigung des Gelkissens kann mit kaltem oder handwarmem Wasser erfolgen. Verwenden Sie dafür ein weiches Tuch. Setzen Sie zur Reinigung keinerlei aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel und auch keine Scheuerschwämme oder Bürsten ein. Verwenden Sie kein heißes oder kochendes Wasser, keine Dampfreiniger und keine konzentrierten Säuren und Laugen. Das Gelkissen sollte nur kurzzeitig mit alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln behandelt werden, da diese zur Zerstörung der Gelkissenhülle beitragen können. Ein längeres Eintauchen des Gelkissens in alkoholhaltige Flüssigkeiten ist nicht zu empfehlen, ein Abwischen ist dagegen unbedenklich. Beachten Sie bei der Wahl eines geeigneten Desinfektionsmittels auch die Angaben des jeweiligen Herstellers. Das Gelkissen selbst ist nicht maschinenwaschbar und nicht schleuder- oder trocknergeeignet. Der Bezug kann durch Öffnen des Reißverschlusses vom Kissen getrennt werden und mit handelsüblichem Colorwaschmittel bei 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden. Beachten Sie bitte die Angaben auf dem Pflegeetikett. Der trockene Bezug kann leicht wieder auf das Kissen gezogen werden. Beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise. Die Antirutschmatte kann ebenfalls bei 30 °C gewaschen werden. Vor dem Wiedereinsatz bei einem anderen Patienten sollte eine gründliche Reinigung und Desinfektion des Kissens und all seiner Bestandteile erfolgen.

Bewahren Sie das Gelkissen flach und ohne Knicke in geschlossenen Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Die Lagertemperatur sollte zwischen 0° und 30 °C liegen. Vor Gebrauch auf Raumtemperatur anwärmen.

6. Technische Daten

| Produkt | Gewicht | Größe |
|-----------------|---------|------------------|
| Gelkissen ST 40 | 4,22 kg | 40 x 40 x 2,5 cm |
| Gelkissen ST 43 | 4,34 kg | 43 x 43 x 2,5 cm |
| Gelkissen ST 45 | 4,98 kg | 45 x 42 x 2,5 cm |
| Gelkissen ST 48 | 5,08 kg | 48 x 42 x 2,5 cm |

Lieferumfang:

Gelkissen: Polyurethan-Gel in einer Polyurethanfolie, Farbe blau
 Bezug: 100 % Polyester mit Reißverschluss, Farbe schwarz
 Rutschmatte: Produkt KISSEN-ANTIRUTSCH (Art.-Nr. 117600), 30 x 30 cm, verschiedene Farben

7. Entsorgung:

Die Entsorgung über den Restmüll ist erlaubt. Das Eindringen des Gels in die Kanalisation, Wasserläufe oder in den Erdboden sollte verhindert werden.

Die Gewährleistung für dieses Produkt auf Material- und Verarbeitungsfehler beträgt in Verbindung mit dem Kauf-/Lieferbeleg 12 Monate. **Schäden durch unsachgemäße Behandlung sind hiervon ausgenommen.** Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB-Gelkissens und muss daher aufbewahrt werden. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.