

RÜCKENGURT ST EASY

Art.-Nr. 201090



Zweckbestimmung und Einsatzbereich

Dieser RÜCKENGURT ST EASY für Rollatoren ist zur Nutzung an einem Rollator mit 22 mm rundem Rohrdurchmesser bestimmt. Er dient als Rückenstütze beim Sitzen auf der Sitzfläche des Rollators.

Kontraindikation

Dieser MPB-Rückengurt ist für Rollatoren mit anderen Rohrdurchmessern oder Rohrformen nicht geeignet. Er kann ausschließlich an Rollatoren mit Sitzfläche genutzt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Gebrauchsanweisung ist vor dem 1. Gebrauch zu lesen und stets zu beachten.
- Stellen Sie immer erst die Feststellbremse fest, bevor Sie sich setzen.
- Die Gebrauchs- und Montageanleitung ist Bestandteil jedes MPB- Rückengurtes für Rollatoren, sie ist aufzubewahren und bei Weitergabe auszuhändigen.
- Die Montage ist nur durch geschultes Fachpersonal durchzuführen.

Montage/Bedienung

Vor der Montage ist die Montage- und Gebrauchsanweisung aufmerksam zu lesen. Die Montage soll durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Bitte überprüfen Sie den Artikel auf Beschädigungen und auf Vollständigkeit. Der ordnungsgemäße Sitz und die Einstellung sind nach der Montage sicher zu stellen.


1. Stellen Sie die Bremsen fest und entfernen Sie die verchromten Griffrohre aus dem Rollator.
2. Lösen Sie die äußeren Schrauben an der Befestigungsschelle.
3. Stecken Sie die verchromten Griffrohr-Enden von oben in die nach unten gekröpften Kunststoff-Halterungen des Rückengurtes. Achten Sie auf die R/L-Kennzeichnung. (Bild 8)
4. Stecken Sie die Schiebegriff-Rohre wieder in den Rollator und ziehen Sie die Befestigungsschrauben in passender, gewünschter Höhe wieder fest an.
5. Als Letztes stellen Sie die gewünschte Gurthöhe durch Verschieben auf dem Rohr gleichmäßig ein und ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Rohrschellen wieder fest.
6. Nach 1-2 Tagen bitte alle Schrauben zur Sicherheit prüfen und ggf. nachziehen.



Einstellung der Gurtlänge

Der Gurt ist auf 575 mm Länge bei Lieferung eingestellt, kann aber um maximal 70 mm auf 635 mm verlängert werden. Die Einstellung einer anderen Gurtlänge kann ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Um die Länge einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

7. Legen Sie den Rückengurt mit der auf den Enden sichtbaren L/R- Kennzeichnung mit der Polsterung nach oben.
8. Lösen Sie die Schrauben an der Gurtenden und legen Sie die Kunststoffenden mit der Kröpfung nach unten an der jeweiligen Seite ab. Durch Verwendung der weiter nach außen befindlichen Löcher wird der Gurt von Loch zu Loch um jeweils knapp 18 mm auf jeder Seite verlängert.
9. Wählen Sie die passenden Befestigungslöcher, setzen Sie die Schrauben und Muttern wieder ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest, um ein Abkippen des Gurtes nach unten sicher zu verhindern.

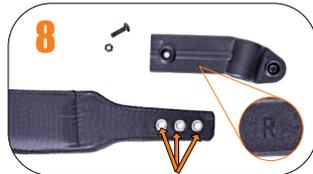

Pflege, Reinigung und Desinfektion

Zur Reinigung kann der Rückengurt mit einem feuchten Tuch, gegebenenfalls unter Zusatz eines milden Reinigungsmittels, abgewischt werden. Verwenden Sie lauwarmes Wasser und bei Bedarf nicht schleifmittelfreie, pH-Wert neutralisierte, handelsübliche Haushaltsreiniger. Bei Bedarf kann der Gurt mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln per Sprüh- oder Wischdesinfektion desinfiziert werden. Beachten Sie unbedingt die Anwendungsvorschriften des Herstellers. Verwenden Sie keine Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die konzentrierte Säuren und Laugen, Chlorkohlenwasserstoff und Chlor enthalten.

Wartung und Instandhaltung

Prüfen Sie monatlich die Nähte und die Festigkeit der Verschraubung. Defekte oder beschädigte Gurte dürfen keinesfalls weiter benutzt werden und müssen sofort ausgetauscht werden.

Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Durch Einflüsse von Witterung und UV-Strahlung, mechanischer Belastung sowie natürlicher Alterung oder unachtsamen Umgang kann vorzeitiger Verschleiß verursacht werden, auf den Hersteller keinen direkten Einfluss hat. Reinigen Sie den Gurt vor jedem Wiedereinsatz (siehe: Pflege, Reinigung und Desinfektion).

Entsorgung

Der Gurt kann sicher über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten

Artikelnummer:	201090
Länge ca.:	575-645 mm
Gurtbreite ca.:	65 mm
Rohrdurchmesser:	22 mm
Gewicht ca. :	0,2 kg

Zulässige Umgebungsbedingungen:
Temperatur im Bereich von -10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bis zu 80%