

! Bitte diese Montageanleitung mit Sicherheitshinweisen unbedingt vor Montage lesen und beachten!

! Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Verpackungstüte von Säuglingen und Kleinkindern fern!

Alle Original-MPB-Rollatorschirme schützen Sie optimal vor Regen und Sonne, sie blockieren die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig. Das patente Air-Vent-System sorgt für eine weitgehende Entlastung und zusätzliche Stabilität bei windigem Wetter. Der Befestigungskloben ist ideal geeignet für die senkrechte Montage an Topro-Rollatoren und Rollatoren mit gleichartigen Ovalrohren.

Inhalt der Verpackung: Rollatorschirm (Abb. 1, Beispiel Schirm Schwarz), vormontierter Befestigungskloben (Abb. 2B)



Abb. 1: Rollatorschirm Blau oder Schwarz

1a – Verstellring
1b – Verstellgelenke

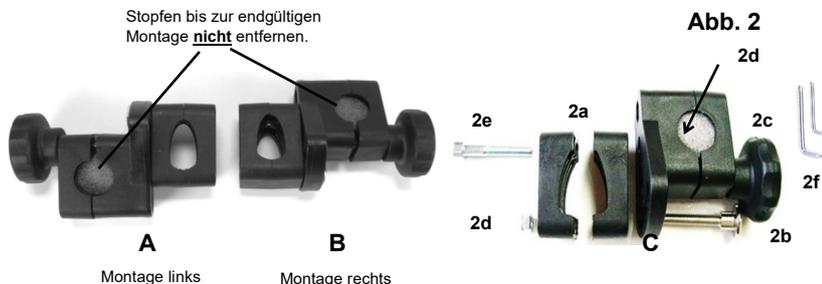


Abb. 2: Befestigungskloben Topro

A) Kloben umgebaut für Montage am linken Griffrohr
B) Kloben vormontiert für Montage am rechten Griffrohr
C) Einzelteile des Klobens
2a – Schelle für Topro-Ovalrohre
2b – Flachkopfschraube M6 x 45 mm
2c – Handrad mit Mutter
2d – Sicherungsmutter
2e – Schraube M6 x 40 mm
2f – Sechskantschlüssel SW5 und SW4

Montieren Sie die Halterung bitte am oberen Verstellloch des Griffrohrs unterhalb des Bremsgriffs!

Montage des Rollatorschirms an Topro-Rollatoren:



Abb. 3



Abb. 4

Abb. 3: Montierter Kloben

Der Kloben wird möglichst weit oben unterhalb des rechten Schiebegriffs montiert.

Abb. 4: Halterung mit eingestecktem Schirm

Der lange Einsteckzapfen ermöglicht das Einstecken des Schirmes auch bei Modellen mit hohen Griffen.

1. Der Befestigungskloben ist bereits soweit vormontiert (Abb. 2B), dass er mit wenigen Handgriffen an der rechten Seite des Topro-Rollators angebracht werden kann. Die Aufnahmeschelle für das Schirmrohr steht nach vorn. Er ist natürlich auch geeignet für Rollatoren mit gleichartigen Ovalrohren, z.B. Handicare Gemino, Volito, Uniroll Topas Premium.
2. Beachten Sie bitte die Kennzeichnung „OBEN/ TOP ↑“ bei der Montage des Klobens. Nur so ist eine senkrechte Ausrichtung der Schirmstange und somit die waagerechte Ausrichtung des Schirmdaches möglich.
3. Die Befestigung des Klobens ist in Abb. 2 bzw. 3 gezeigt. Sie lösen die Schrauben (2b und 2e) mithilfe der beigelegten Sechskantschlüssel und legen die Schelle 2a in Höhe des obersten Verstelllochs um das Rollatorrohr auf der rechten Seite des Rollators herum. Anschließend verbinden Sie die Schrauben wieder mit den Muttern 2d. Wollen Sie die Halterung auf der linken Rollatorseite montieren, müssen Sie die Schelle um 180° entsprechend der Rohrform drehen, da auch hier der Kloben mit der Kennzeichnung „OBEN/TOP“ nach oben montiert werden muss (Abb. 2A). Die Aufnahmeschelle für das Schirmrohr steht nach hinten.
4. Nun können Sie den grauen Schaumstoffstopfen aus der Halterung entfernen und den Schirm einstecken (Abb. 4).

Abb. 5

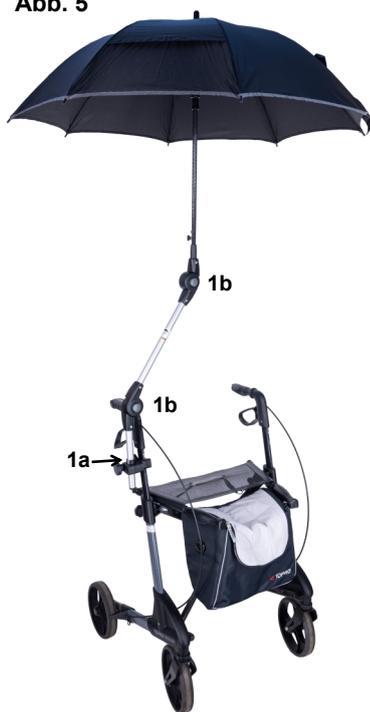


Abb. 5: Ausgeklappter und geöffneter Rollatorschirm

Nachdem Sie den Schirm mit den Verstellgelenken **1b** in die gewünschte Position gebracht haben, können Sie ihn öffnen.

Eine Videoanleitung für die grundsätzliche Bedienung der MPB-Rollatorschirme finden Sie auch unter www.youtube.com unter dem Stichwort: „MPB Rollatorschirm“!

Bedienung des Schirms:

1. Nach dem Einstecken in die Halterung können Sie mit dem Verstellring (**1a**) die von Ihnen gewünschte Höhe einstellen und den Schirm sichern.
2. Durch Drücken der grauen Verstellknöpfe an den Knickgelenken (**1b**) können Sie den Schirm in verschiedene Positionen bringen. Durch leichte Drehung des Einsteckzapfens in der Klemmeinheit kann die Position des Schirmes zusätzlich verändert werden. Lösen Sie dazu das Handrad (**2c**) und drehen es nach dem Verstellen wieder fest. Im optimalen Fall sollte die Schirmstange direkt rechts oder links neben Ihrem Gesicht verlaufen.
3. Öffnen Sie die Klettgurte der Schirmbespannung und drücken Sie den Öffnungsknopf des Schirmes. Der Schirm öffnet sehr schnell – bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
4. Möchten Sie den Schirm einklappen, so verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge. Rollen Sie nur vollständig getrocknete Schirme wieder ein.

SICHERHEITSHINWEISE:

Der Schirm muss so angebracht werden, dass der Faltmechanismus des Rollators oder Rollstuhles und die Funktion wichtiger Teile wie zum Beispiel der Bremsen nicht eingeschränkt werden.

Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren.

Der Schirm öffnet sich sehr schnell automatisch auf Knopfdruck. Halten Sie ihn vom Körper entfernt und achten Sie auf andere Personen in der Nähe, um Verletzungen zu vermeiden.

Beim Öffnen und bei geöffnetem Schirm besteht Verletzungsgefahr anderer durch die äußeren Schirmspitzen an den Enden der Schirmbespannung. Beim Einklappen des Schirmes und des Halters in umgekehrter Reihenfolge besteht konstruktionsbedingt Klemmgefahr für die Finger in den Knickgelenken.

Mit einem Rollatorschirm nehmen Sie mehr Raum ein, auch dann, wenn der Schirm ausgeklappt, aber nicht geöffnet ist. Beachten Sie bei geöffnetem Schirm, dass Sie mit diesem seitlich rechts und links hängen bleiben können. Achten Sie auch auf die Gesamthöhe, damit Sie nicht z.B. mit ausgefahrenen Markisen kollidieren. Vor dem Einfahren in Gebäude ist der Schirm zu schließen und herunterzuklappen.

Jeder Schirm bietet dem Wind eine enorme Angriffsfläche. Benutzen Sie daher den aufgespannten Rollatorschirm bzw. Rollstuhlschirm auf keinen Fall bei Wind und Böen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie der aufgespannte Schirm beim Fahren mit dem Rollator bzw. Rollstuhl negativ beeinflusst, so klappen Sie den Schirm sofort wieder ein, um Unfälle zu vermeiden.

Klappen Sie den Schirm bei Nichtgebrauch ein. Sichern Sie die hochwertige, trockene Stoffbespannung des Schirmes durch Eindrehen und Schließen des Klettverschluss-Bandes und Nutzung der Schirmhülle. Achten Sie darauf, dass der Schirm nicht an Gegenständen und Hindernissen schleifen kann.

Achten Sie bei der Benutzung stets auf ein gut einsehbares, freies Sichtfeld. Behindern Sie andere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer nicht. Bevor Sie den Schirm zum ersten Mal bei Regen benutzen, üben Sie bitte das Öffnen und Schließen mehrfach in „Trockenübungen“. Rollen Sie nur vollständig getrocknete Schirme ein und ziehen dann die Schirmhülle über, da es ansonsten zu Stockflecken und/oder Verfärbungen der Bespannung kommen kann.

Vermeiden Sie den Kontakt des Schirms zu Gefahrenquellen wie Sträuchern, Hecken, Zäunen, Zigaretteglut etc., da die Schirmbespannung dadurch beschädigt werden kann.

Vermeiden Sie jeglichen Scheuerkontakt, auch an Halterungsschraube, Griff der Höhenverstellung, Rollatorrahmen und Rädern.

Dieser Artikel darf in defektem Zustand nicht mehr eingesetzt werden. Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil jedes MPB-Rollatorschirms und muss aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist diese Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.