

Montage- und Bedienungsanleitung für EISKRALLE

Die Eiskralle erhöht die Sicherheit von Personen, die auf stockartige Gehhilfen angewiesen sind, auf eis- oder schneeglatten Gehwegen. Sie ist geeignet für Gehhilfen mit 16 - 19,5 mm Durchmesser.



EISKRALLE
Art.-Nr.: 104200

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die beiden Schrauben an der Schelle (**Abb. 1 A**) und entfernen Sie den oberen Teil der Schelle.
2. Falls nötig, klappen Sie nun den Rest der Schelle so um, dass der längere Abschnitt des Halbleches zur Kralle weist, indem Sie die beiden weißen Kappen (**Abb. 1 + 3 B**) zusammendrücken.
3. Jetzt können Sie die Gehhilfe auf die offene Schelle legen. **Achten Sie darauf, dass der Klappmechanismus auf der Gehhilfe in Gehrichtung angebracht wird!**
4. Befestigen Sie zunächst wieder den oberen Teil der Schelle, die Schrauben jedoch noch nicht zu fest anziehen (**Abb. 2**).
5. Verschieben Sie die Eiskralle nun auf der Gehhilfe so, dass die flache Seite der Eiskralle fest auf dem Stockfutter aufliegt. Ziehen Sie jetzt die Schrauben ganz fest an. Das System ist einsatzbereit.
6. Wird die Eiskralle kurzzeitig nicht benötigt, kann sie durch Drücken der weißen Kappen (**Abb. 3 B**) hochgeklappt werden (**Abb. 4**).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Montage haben, empfehlen wir, sich an einen Fachhändler zu wenden.

Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie die Montageanleitung gründlich und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Prüfen Sie vor jeder Nutzung und nach der Betätigung des Klappmechanismus, dass die Eiskralle fest sitzt und der Klappmechanismus sicher eingerastet ist!
- Untersuchen Sie die Eiskralle vor jeder Nutzung auf Schäden. Sie darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden. Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann vorgenommen werden. Bei nicht mit uns abgestimmten Veränderungen am Produkt erlischt das Recht auf Gewährleistung!
- Aufgrund des Anwendungszwecks ist die Eiskralle spitz und scharfkantig. Es besteht daher Verletzungsgefahr! Beachten Sie, dass Sie sich bei der Reinigung nicht verletzen.
- Verwenden Sie die Eiskralle nur bei Eis oder Schnee und nur im Freien!
- Verwenden Sie die Eiskralle niemals auf empfindlichen Fußböden!
- Wenn die Eiskralle montiert ist, achten Sie bitte besonders auf Ihre Umgebung, da andere Personen durch die Spitzen der Eiskralle verletzt oder Gegenstände beschädigt werden können.
- Demontieren Sie die Eiskralle, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

Reinigung:

Wir empfehlen die Reinigung mit einem feuchten Tuch und einem milden Allzweckreiniger.

Diese Anleitung ist Bestandteil jeder MPB-EISKRALLE und muss aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist diese Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.