

# Montage- und Bedienungsanleitung für ANTIKIPP-ROLLE

Die mehrfach höhenverstellbaren Antikipp-Rollen verhindern das Kippen des Rollstuhls nach hinten und bieten somit eine zusätzliche Sicherheit beim Bewältigen von Bordsteinen und ähnlichen Hindernissen.



ANTIKIPP-ROLLE  
Art.- Nr: 124615



## Montage:

1. Die Antikipp-Rolle wird an der Kipphilfe Ihres Rollstuhls angebracht und ist für Kipphilfen mit einem Rohrdurchmesser von 22 und 25 mm geeignet. Bitte benutzen Sie die Antikipp-Rolle paarweise, um einen optimalen Kippschutz gewährleisten zu können.
2. Lösen Sie zunächst die Gummiprofile von der Kipphilfe. Zum Anbringen der Antikipp-Rolle müssen, falls nicht vorhanden, waagerechte Löcher in die Kipphilfe gebohrt werden (geeignet für M6-Schrauben).
3. Lösen Sie die Hutmutter (**Abb. 1 A**) und ziehen Sie die Schraube aus dem schwarzen Rohradapter der Antikipp-Rolle.
4. In dem Rohradapter ist ein Einsatz, der den Adapter auf 22 mm verkleinert. Bitte belassen Sie diesen in dem Adapter, wenn Sie eine Kipphilfe mit 22 mm Rohrdurchmesser haben. Entfernen Sie den Adapter, wenn Sie eine Kipphilfe mit 25 mm Rohrdurchmesser haben.
5. Befestigen Sie nun die Antikipp-Rolle an Ihrer Kipphilfe, indem Sie die Schraube und die Hutmutter (**Abb. 1 A**) wieder verbinden.
6. Stellen Sie nun die gewünschte Höhe für die Rollen ein, indem Sie die Metallscheibe (**Abb. 2 B**) zu sich heranziehen, den schwarzen Rohradapter auf dem silbernen Rohr verschieben und die Scheibe dann wieder einrasten lassen. Wir empfehlen einen Abstand der Rollen vom Boden von 3 - 5 cm.



Abb. 1

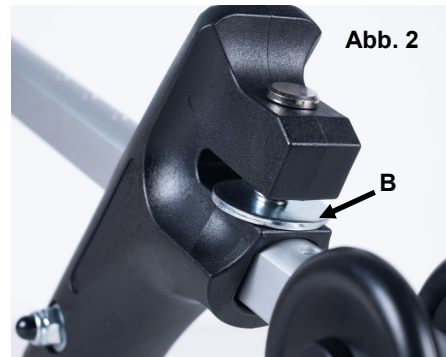


Abb. 2

## Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie die Montageanleitung gründlich und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Wir empfehlen dringend, die Antikipp-Rollen nur paarweise zu benutzen.
- Prüfen Sie vor jeder Nutzung, ob die Schraube und die Mutter des Rohradapters fest sitzen und der schwarze Rohradapter an der gewünschten Höhe fest eingerastet ist.
- Untersuchen Sie die Antikipp-Rolle regelmäßig auf Beschädigungen und Vollständigkeit. Das Produkt darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden. Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann vorgenommen werden. Bei nicht mit uns abgestimmten Veränderungen am Produkt erlischt das Recht auf Gewährleistung!
- Achten Sie auch mit montierten Antikipp-Rollen beim Ankippen des Rollstuhls beim Überwinden von Höhenunterschieden auf Ihre Umgebung.

## Reinigung:

Wir empfehlen die Reinigung mit einem feuchten Tuch und einem milden Allzweckreiniger.

Diese Anleitung ist Bestandteil jeder MPB-ANTIKIPP-ROLLE und muss aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist diese Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.