



# Rollstuhlzubehör

Unsere Ideen helfen im Alltag

und mehr...

## Gebrauchsanweisung

# GERIDREH CE



### 1. Allgemeine Produktinformationen:

Bezeichnungen:	GERIDREH 40
Artikelnummern:	301500
Durchmesser:	400 mm
Maximale Tragkraft:	120 kg (GERIDREH 40)
Geeignet für:	Trockene Böden im Innenbereich

Der Drehteller ist auf der Unterseite mit Anti-Rutsch-Noppen ausgestattet, die auf ebenem, trockenem Boden im Innenbereich eine weitgehende Rutschfestigkeit garantieren. Er ist 24-fach kugelgelagert und durch ein in sich zusätzlich drehendes System auch bei schweren Patienten leichtgängig.

### 2. Zweckbestimmung/Einsatzbereich:

Drehteller wie GERIDREH dienen als Transferhilfe für Patienten mit Bewegungseinschränkungen. Sie erleichtern Pflegepersonal das Umsetzen eines noch sitz- und stehfähigen Patienten, der mit Unterstützung etwas Gewicht mit den Füßen übernehmen kann. Durch den reduzierten Zeit- und Kraftaufwand werden sowohl Pflegekraft als auch Patient erheblich entlastet. GERIDREH kann sowohl zu Hause als auch in Altenheimen, Rehabilitationseinrichtungen und Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Er ist ausschließlich für den trockenen Innenbereich vorgesehen.

### 3. Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich und befolgen Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Prüfen Sie den Drehteller regelmäßig auf Beschädigungen. Ein beschädigter Drehteller darf nicht mehr eingesetzt werden. Wenden Sie sich zwecks Austauschs an einen Fachhändler. Bauen Sie den Drehteller keinesfalls auseinander.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass alle 6 Anti-Rutsch-Noppen unter dem Drehteller vorhanden sind. Selbst beim Fehlen einer einzigen Noppe darf der Drehteller aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden.
- Das maximal zulässige Körpergewicht (siehe 1.) darf nicht überschritten werden.



# Gebrauchsanweisung

- Benutzen Sie den Drehteller niemals allein, sondern nur zusammen mit einer Hilfs- bzw. Pflegeperson. Beurteilen Sie gegebenenfalls zusammen mit einem Arzt, ob der Drehteller sicher verwendet werden kann. Kann der Patient selbst mit Unterstützung sein Gewicht nicht tragen, darf der Drehteller nicht eingesetzt werden.
- Bitte belasten Sie den Drehteller stets mittig.
- Stellen Sie sicher, dass der Drehteller nur auf einem ebenen, trockenen und sauberen Boden im Innenbereich zum Einsatz kommt. Auch die Oberfläche des Drehtellers selbst sollte trocken sein. Ansonsten besteht Rutsch- bzw. Sturzgefahr!
- Bitte lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Drehteller allein. Das Produkt ist kein Spielzeug!
- Halten Sie den Drehteller von Zündquellen wie Kerzen und brennenden Zigaretten fern.
- Räumen Sie den Drehteller nach der Benutzung weg und lassen Sie ihn nicht am Boden liegen. Ansonsten könnte jemand über das Hindernis stolpern.

## 4. Hinweise zur Nutzung

1. Vor der Nutzung lesen Sie sich bitte die komplette Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie unbedingt die oben stehenden Sicherheitshinweise.
2. Legen Sie den Drehteller mit den Anti-Rutsch-Noppen nach unten an eine für die optimale Nutzung passende Stelle. Verschieben Sie den Drehteller nicht nachträglich mit den Füßen, da sich sonst durch die gute Stoppwirkung die Anti-Rutsch-Noppen lösen könnten.
3. Die Füße des Patienten werden nun mittig auf dem Drehteller platziert. Die pflegende Kraft kann dabei mit dem Fuß am Rand des Drehtellers eine ungewollte Drehung vermeiden.
4. Nach dem Aufrichten der pflegebedürftigen Person kann diese mit der Drehscheibe in die gewünschte Position gedreht und dort wieder abgesenkt werden.

## 5. Reinigung, Pflege und Lagerung

Die Reinigung des Drehtellers kann mit einem feuchten Tuch oder Schwamm mit milder Seifenlauge erfolgen. Setzen Sie zur Reinigung keinerlei aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel und auch keine Scheuerschwämme oder Bürsten ein. Verwenden Sie kein heißes Wasser, keine Dampfreiniger, keine konzentrierten Säuren und Laugen. Tauchen Sie den Drehteller nicht in Flüssigkeiten ein. Wir empfehlen eine Desinfektion mit 75 % Alkohol. Bei Verwendung eines handelsüblichen Desinfektionsmittels beachten Sie bitte unbedingt die Angaben des Herstellers. Lagern Sie den Drehteller in trockenen, geschlossenen Räumen. Wir empfehlen die Lagerung bei Raumtemperatur. Setzen Sie den Drehteller keinen Temperaturen unter 5° bzw. über 70 °C aus. Halten Sie ihn von direktem Sonnenlicht fern. Prüfen Sie, wie in den Sicherheitshinweisen angegeben, das Produkt regelmäßig auf die Funktionsfähigkeit. Die konkrete Lebensdauer des Produkts hängt sehr stark davon ab, welchen Einflüssen dieses im Laufe der Zeit ausgesetzt ist. Luftfeuchtigkeit, langfristige Sonneneinstrahlung, chemische Substanzen, starke Belastung und unachtsamer Umgang können sich negativ auf die Lebensdauer auswirken. Ein Wiedereinsatz ist nach gründlicher Reinigung und Desinfektion möglich.

## 6. Technische Daten:

### GERIDREH 40:

Gewicht:	ca. 1,04 kg
Größe:	Durchmesser 400 mm, Höhe 18 mm
Farbe:	schwarz
Material:	Kunststoff (PE), Kugeln: Stahl, verzinkt

## 7. Entsorgung:

Bitte entsorgen Sie den Drehteller über den Hausmüll.

Die Gewährleistung für dieses Produkt auf Material- und Verarbeitungsfehler beträgt in Verbindung mit dem Kauf-/Lieferbeleg 12 Monate. **Schäden durch unsachgemäße Behandlung sind hiervon ausgenommen.** Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB-Drehtellers und muss daher aufbewahrt werden. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.

**Dieses Medizinprodukt der Klasse I trägt die CE Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745. Dieses Produkt entspricht den auf das Produkt anzuwendenden regulatorischen Anforderungen. Bitte melden Sie im Zusammenhang mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle umgehend uns und den zuständigen Behörden.**