

Bedienungs- und Pflegeanleitung für Sitzkissen SIKI 40 AR – 48 AR



1. Alle SIKI AR-Kissen entsprechen in allen Punkten den gesetzlichen Bestimmungen. Es handelt sich um Qualitätsschaumstoff.
2. Die Sitzkissen-Bezüge sind durch Reißverschluss abnehmbar und bei 40° Grad waschbar. Bitte beachten Sie im Einzelnen das jeweils angenähte Pflegeetikett.
3. Nach dem ersten Waschen des Sitzkissen-Bezuges werden Sie feststellen, dass dieser geringfügig eingelaufen sein kann. Durch dieses geringfügige Einlaufen nach der Wäsche, sitzt der Bezug absolut stramm und faltenfrei auf dem Kissen.
4. Bitte beachten Sie, dass gefärbte Stoffe auch über die erste Wäsche hinaus „ausbluten“ können. Waschen Sie daher bitte den Kissenbezug ausschließlich mit gleichfarbiger Wäsche.
5. Aus hygienischen Gründen sollte ein Kissen immer nur für einen Patienten eingesetzt werden. Bei einer vorliegenden Inkontinenz muss das Kissen z. B. mit dem MPB – Artikel „SCHUTZBEZUG L“ oder „SCHUTZBEZUG XL“ vor eindringenden Flüssigkeiten geschützt werden.
6. Die Sitzkissen SIKI AR werden einfach auf den Rollstuhlsitz oder Stuhl gelegt.



Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden!



Die Antirutschfunktion des Kissens ist nicht dafür geeignet, Patienten mit nachlassender Körperkraft im Rollstuhl zu sichern. Nutzen Sie dafür geeignete Haltegurte.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB Kissens SIKI AR und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.