
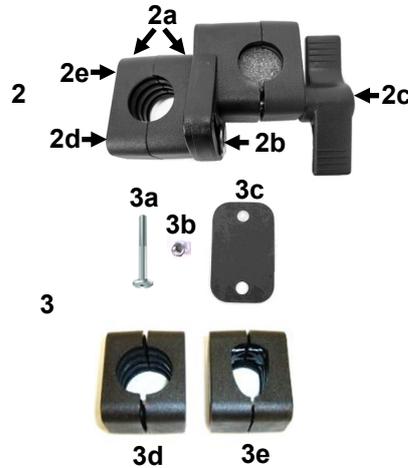


Montageanleitung für KLAPPTISCH TR

Inhalt:

Nicht für Delta-Gehräder geeignet!

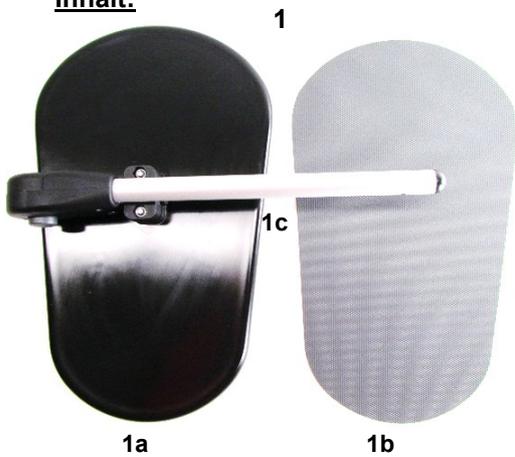


- 1 – Klappstisch mit Gestänge**
 1a – Klappstisch
 1b – Rutschfeste Auflage
 1c – Zapfen
- 2 – Vormontierter Befestigungskloben**
 2a – Schelle 22 mm
 2b – Schraube C45
 2c – Flügelgriff mit Mutter
 2d – Sicherungsmutter
 2e – Schraube B40
- 3 – Zubehör**
 3a – Schraube C45
 3b – Ersatz-Sicherungsmutter
 3c – Gummischeibe für waagerechte Montage
 3d – Schelle 25
 3e – Schelle TG
- Zusätzlich (ohne Abbildung)
 – Einwegschlüssel SW4+SW5
 – Ersatzklebepunkte

Abb. 1: Standard-Rollator mit Rohrdurchmesser 22 oder 25 mm



Montage so hoch wie möglich auf angerauter Fläche!

Abb. 2: Rollator Topro Troja, Handicare Gemino und gleichartige

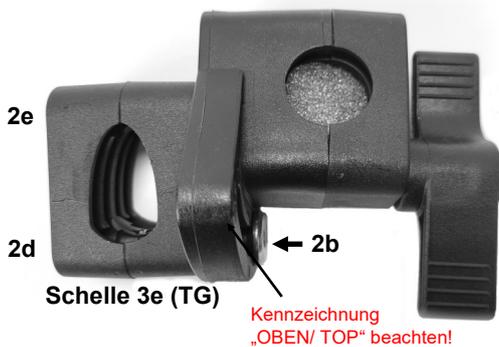

Montage so hoch wie möglich unterhalb des Bremsgriffs!

⚠ Bei der Montage an diesen Modellen kann es durch die Schrauben zu einer geringfügigen, unvermeidbaren Oberflächenbeschädigung kommen, die aber bei montiertem Kloben unsichtbar ist und bleibt. Verschieben Sie den Kloben im montierten Zustand **nicht** auf dem Rohr (Gefahr von Kratzspuren)!

Abb. 3: waagerechte Montage an Rollstühlen und bestimmten Rollatoren (z.B. Rebotec Polo)



⚠ Bei der waagerechten Montage bitte die Gummischeibe zwischen die Schelle 2a bzw. 3d legen, um ein Drehen am Rohr zu vermeiden!

Montage:

1. Dieser Klappstisch ist bereits soweit vormontiert, dass er mit wenigen Handgriffen an Standard-Rollatoren mit einem Rohrdurchmesser von 22 mm angebracht werden kann (**Abb. 1**). Bei einem Rohrdurchmesser von 25 mm verwenden Sie bitte die beiliegende Schelle 25 (**3d**).
2. Für die Montage an den Rollatoren Handicare Gemino, Topro Troja oder gleichartigen (**Abb.2**) verwenden Sie bitte die Schelle TG (**3e**).
3. **Abb.1 und 2** zeigen die Montage der Halterung am Schiebegriff-Rohr des Rollators. Entfernen Sie den in der Halterung eingelegten grauen Stopfen erst nach der Montage des Klobens. Sie können zusätzlich noch den Winkel der Halterung verstellen, indem Sie Schraube 2b leicht versetzen, um den Klappstisch **senkrecht** am Rollator montieren zu können. Der Flügelgriff (**2c**) sollte dabei nach außen zeigen, um das Sitzen auf dem Sitzbrett des Rollators nicht zu beeinträchtigen.
4. Für die waagerechte Montage an Rollatoren, wie z.B. Rebotec Polo sowie an handbetriebene Rollstühle nutzen Sie bitte die beigelegte Schraube C-45 (**3a**) und montieren Sie den Kloben wie in **Abb. 3** gezeigt. Legen Sie zusätzlich die mitgelieferte schwarze Antirutsch-Scheibe (**3c**) zwischen Rohr und Schellen, um ein Verrutschen der Halterung auf dem Rohr zu vermeiden.
5. Stecken Sie den Zapfen (**Abb. 1c**) des Tisches in die Halterung, drehen Sie den Tisch wie in **Abb. 6** beschrieben und ziehen Sie den Flügelgriff fest. Stellen Sie sicher, dass der Tisch absolut waagerecht ist. Anschließend ziehen Sie mit dem kleineren mitgelieferten Sechskantschlüssel die beiden Schrauben auf der Tischplatte (**Abb. 4**) fest. Sollte der Zapfen zu lang sein, können Sie ihn entsprechend mit einer Säge kürzen.
6. Drehen Sie nun den Tisch so, wie in **Abb. 6 und 7** gezeigt und ziehen den Flügelgriff so fest, dass der Tisch zwar fest arretiert, aber dennoch drehbar bleibt.
7. Zuletzt wird die beiliegende Anti-Rutsch-Matte auf dem schwarzen Tisch befestigt. Dazu ziehen die Folie der Klebepunkte (**Abb. 4**) ab und legen die graue Anti-Rutsch-Matte mit der Noppenseite nach oben auf den Tisch. Ihr Tisch ist nun gebrauchsfertig (**Abb. 7**).

Bedienung:

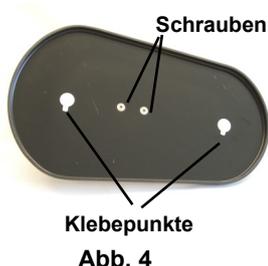


Abb. 4

 **Achtung:** Der Tisch muss so angebracht werden, dass Funktionen der Bremsen, Klingel, Stockhalter, Lampe, etc. nicht beeinträchtigt werden. Der Tisch kann senkrecht maximal bis zu einer Schräge von 35° befestigt werden. Die Schrauben an der Halterung sollten regelmäßig auf ihren festen Sitz kontrolliert werden!



Abb. 5
Abgeklappter Tisch außen



Abb. 6
Hochgeklappter Tisch



Abb. 7
Gebrauchsfertiger Tisch

1. Sie können den Tisch bei Nichtgebrauch bequem abklappen (**Abb. 5**). Drücken Sie dazu den grauen Druckknopf am Knickgelenk.
2. Wenn Sie den Tisch nutzen wollen, achten Sie bitte immer darauf, dass die Tischplatte waagrecht steht und der Druckknopf eingerastet ist, bevor Sie ihn belasten. Der Tisch kann gleichmäßig mit bis zu 2,5 kg belastet werden.
3. Sie können die Tischplatte in verschiedene Positionen drehen (**Abb. 7**). Zur Veränderung der Position lösen Sie bitte leicht den Flügelgriff der Halterung, drehen den Zapfen und ziehen den Flügelgriff wieder fest.
4. Wenn Sie mit dem Rollator/dem Rollstuhl fahren, achten Sie bitte darauf, den Tisch entweder einzuklappen (**Abb. 5**) oder innen zu positionieren (**Abb. 7**).

Reinigung, Lagerung:

Reinigen Sie Ihren Klappstisch mit lauwarmem Wasser unter Zusatz eines neutralen Spülmittels. Nutzen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Setzen Sie zur Reinigung keinerlei aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel und auch keine Scheuerschwämme oder Bürsten ein. Verwenden Sie kein heißes Wasser, keine Dampfreiniger, keine konzentrierten Säuren und Laugen. Bei Verwendung eines Desinfektionsmittels beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers. Lagern Sie den Klappstisch in geschlossenen Räumen und ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Sicherheitshinweise:

Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim Fahren mit dem Rollstuhl oder Schieben des Rollators den Tisch immer innen positionieren (**Abb. 7**) oder abklappen (**Abb. 5**), um ein Zusammenstoßen mit Hindernissen zu vermeiden.

Dieser Artikel muss regelmäßig auf Beschädigungen und festen Sitz der Halterung geprüft werden. Setzen Sie das Produkt im defekten Zustand nicht mehr ein! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann bzw. Kundendienst vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden **MPB® KLAPPTISCHS TR** und muss daher aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist die Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.