


# Montage- und Bedienungsanleitung für SCHLOSS TR

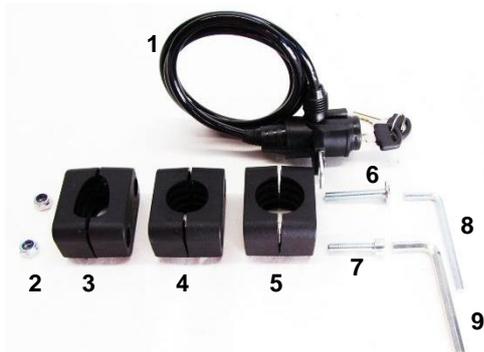

## Inhalt:

- 1 – Schloss
- 2 – 2 x Sicherungsmutter M6
- 3 – ovale Schelle
- 4 – Schelle 22
- 5 – Schelle 25
- 6 – Schraube M6 x 35
- 7 – Schraube M6 x 25
- 8 – Sechskantschlüssel für Schraube 6
- 9 – Sechskantschlüssel für Schraube 7

Mit diesem Artikel haben Sie eine praktische Sicherungshilfe für Ihren Rollator erworben.



Abb. 1

Zur Montage an einem Rollator mit ovalem Rohr, wie z.B. an Topro, Volito, Gemino oder Topas Premium verwenden Sie bitte die ovale Schelle (3) mit den beiliegenden Schrauben (6 + 7) wie in **Abb. 1** und **2** gezeigt.



**Achtung:** Bei der Montage an diesen Modellen kann es durch die Schrauben zu einer geringfügigen, aber unvermeidbaren Oberflächen-Beschädigung kommen, die aber bei montierter Schelle unsichtbar ist und bleibt. Verschieben Sie die Schelle im montierten Zustand **nicht** auf dem Rohr (Gefahr von Kratzspuren)!



Abb. 2

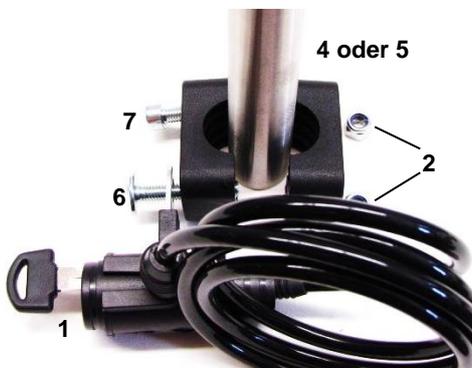


Abb. 3

Zur Montage an einem Standard-Rollator verwenden Sie entweder die Schelle 22 mm (4) oder 25 mm (5), je nach Rohrdurchmesser des Rollators

Befestigen Sie das Schloss (1) am Ausziehrrohr des Rollators oder an gewünschter Stelle wie in **Abb. 3** und **4** gezeigt.



Abb. 4

Nach erfolgter Montage des Schlosses können Sie Ihren Rollator bequem an einem Treppengeländer oder ähnlichem vor Gelegenheitsdieben schützen. Dazu drehen Sie den Schlüssel nach rechts, ziehen den einen Zapfen des Schlosses heraus, legen das Kabelschloss z.B. um den Stab eines Treppengeländers oder einem ähnlich geeigneten Gegenstand, führen das Kabelschloss durch den Rahmen des Rollators, stecken den Zapfen wieder in das Schloss und ziehen den Schlüssel ab. Der Rollator ist nun gesichert.

**Hinweis:** Es handelt sich hier um ein einfaches, normales handelsübliches Spiralkabelschloss, das vor Gelegenheitsdieben schützt. Einen garantierten Schutz gegen professionellen Diebstahl kann es nicht darstellen.

**Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB® SCHLOSS TR und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.**