

Montage- und Bedienungsanleitung für Schiebegrieffhöhung SGE-MPB 25



Lieferumfang:

- 1 x Sechskantschlüssel (1)
- 2 x Befestigungskloben (2)
- 2 x Schiebebügel MPB (3)

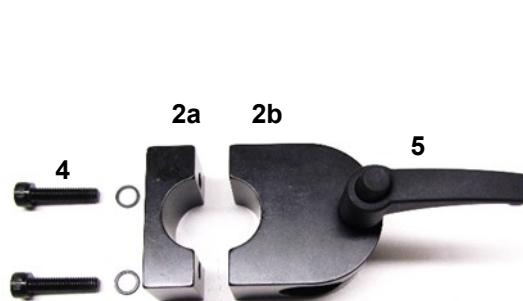


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Mit dieser Anleitung erhalten Sie unsere Schiebegrieffhöhung für Rollstühle mit Griffrohrdurchmesser 25 mm.

1. Drehen Sie zunächst die Klemmhebelschraube (5) wie in **Abb. 1** gezeigt in die Halterungen (2). Lösen Sie dann die beiden Schrauben (4) von einem der Kloben mithilfe des Sechskantschlüssels (1) und montieren die beiden Klobenteile (2a und b) am Griffrohr Ihres Rollstuhls wie in **Abb. 2** bzw. **3** gezeigt. Verfahren Sie mit dem zweiten Befestigungskloben gegengleich am anderen Griffrohr.



Achtung: Die Kloben müssen unbedingt auf dem zylindrischen Stück des Griffrohres montiert werden, um festen Halt sicherzustellen. Nicht im Bereich der Rohrbiegung anbringen! Nach 14 Tagen sämtliche Schrauben nachziehen!

2. Nun werden die Schiebegriffe (3) am Kloben befestigt (**Abb. 2** bzw. **3**). Durch das Feststellen des Klemmhebels (5) können Sie eine auf Sie abgestimmte höhere oder niedrigere Position der Schiebegriffe erreichen, indem Sie das Schiebegriffrohr entsprechend Ihrer Größe im Kloben positionieren. Zur leichteren Montage drücken Sie den Knopf des Klemmhebels und drehen den Hebel in die richtige Position zum weiteren Festziehen. Bei Bedarf fetten Sie das Gewinde der Klemmhebelschraube etwas ein, um das Festdrehen zu erleichtern.



Stellen Sie unbedingt sicher, dass alle Schrauben und Klemmhebel vor Inbetriebnahme ausreichend fest angezogen sind.



Achtung: Die Schiebegriff-Erhöhung ist nur zum Schieben und Lenken des Rollstuhles geeignet. Die Handgriffe dürfen nicht durch Tragen, extremes Kippen etc. belastet werden, da die Gefahr eines Rückenrohrbruchs am Rollstuhl durch den großen Hebelarm besteht. Das Ankippen des Stuhles darf daher nur über die Auftrittskappen und die Original-Schiebegriffe des Rollstuhls erfolgen, nicht über eine Belastung der Schiebegrieff erhöhungen. Verwenden Sie die Schiebegrieff erhöhungen nicht an Leichtgewicht- bzw. Alu-Rollstühlen! Die Bedienungsanleitung des Rollstuhl-Herstellers ist unbedingt zu beachten.

Diese Anleitung ist Bestandteil der SGE-Schiebegrieffhöhung und muss unbedingt aufbewahrt werden.

Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann bzw. Kundendienst vorgenommen werden.