



Rollstuhlzubehör

Unsere Ideen helfen im Alltag

und mehr...

Gebrauchsanweisung

Sitzhose



CE



Gebruiksaanweisung

1. Allgemeine Produktinformationen

Bezeichnungen: SITZHOSE M, SITZHOSE XL
Artikelnummern: 105800, 105900
Passend für: Rollstühle, um deren Rückenlehne ein Gurt mit ca. 60 cm Länge (Größe M) bzw. ca. 75 cm Länge (Größe XL) gelegt werden kann.
Maximales Patientengewicht: 85 kg (SITZHOSE M), 120 kg (SITZHOSE XL)
Diese Sitzhose ist aus einer angenehm weichen Polyester-Baumwolle-Mischung gefertigt und mit strapazierfähigen Gurten mit stabilen Kunststoffsteckschlössern versehen.

2. Zweckbestimmung/Einsatzbereich

Diese Sitzhose verhindert das langsame Herausrutschen aus dem Rollstuhl bei Patienten mit nachlassender Körperkraft. Der Patient wird dabei durch Gurte gehalten die an den breiten, weichen Enden der Sitzhosen angebracht sind und die um die Beine bzw. die Rollstuhllehne gelegt werden. Sie wird üblicherweise in Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhäusern und im Altenpflegebereich eingesetzt. Die Sitzhose ist nicht geeignet für Patienten mit spastischen Lähmungen. Bitte verwenden Sie die Sitzhose nicht für die Sicherung des Patienten beim Transport mit dem Auto.

3. Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich und befolgen Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Überprüfen Sie die Sitzhose vor der Benutzung auf Beschädigungen. Eine beschädigte Sitzhose darf nicht mehr eingesetzt werden und muss unverzüglich ausgetauscht werden. Achten Sie besonders darauf, ob Halteelemente verschlissen sind. Vermeiden Sie den Einsatz von **spitzen** Gegenständen, da diese die Sitzhose beschädigen könnten. Achten Sie auf scharfe Kanten bei der Befestigung der Sitzhose am Rollstuhl, um ein Verschleifen der Halteelemente zu vermeiden.
- Diese Sitzhose ist nicht für Patienten mit **spastischer Lähmung** geeignet und darf bei diesen Patienten nicht eingesetzt werden.
- Haltegurte und Sitzhosen müssen körpernah anliegen. Bitte **achten** Sie auf die Sitzgenauigkeit der Gurte. Nicht korrekt sitzende Gurte sind eine ernste Gefahr und können zu **Unfällen** wie z.B. Strangulationen führen!
- Achten Sie bitte darauf, dass es nicht zum **Faltenwurf** durch die **Kleidung** des Patienten kommt. Dies könnte sonst Druckstellen zur Folge haben. Zur Vermeidung von **Scheuerstellen** setzen Sie bitte die Sitzhose nicht auf nackter Haut ein.
- Halten Sie die Gurtenden stets geschlossen. **Lose herabhängende Gurte** können in die Speichen gelangen und schwere Unfälle verursachen.
- Bitte prüfen Sie, ob eine Verbindung der Sitzhose z.B. durch **Schrauben** oder **Stegschnallen** mit den Rohren des Rollstuhls sinnvoll ist. Dies kann je nach Rollstuhl und **Rückenlehnenausführung** der Fall sein. Bitte kontaktieren Sie dazu auch den Hersteller Ihres Rollstuhls. Lassen Sie die Befestigung durch **Fachpersonal** vornehmen.
- Bitte beachten Sie die gesetzlichen **Bestimmungen zur Fixierung von Patienten**. Dies ist insbesondere wichtig bei Patienten, die die **Steckschlösser der Sitzhose nicht selbständig öffnen können**.
- Wir empfehlen, die Sitzhose **nur unter Aufsicht einer weiteren Person einzusetzen**. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Patienten **mutwillig oder zufällig** die **Steckschlösser der Sitzhose öffnen** und dadurch nicht mehr sicher gehalten werden können.
- Bitte **achten** Sie unbedingt auf das **maximal zulässige Patientengewicht**.
- Benutzen Sie die Sitzhose keinesfalls beim Transport im Auto. Sie ist kein Ersatz für einen Sicherheitsgurt.
- Die Sitzhose dient nicht der Sicherung des Oberkörpers. Dieser muss, wenn erforderlich, durch eine zusätzliche Maßnahme (z.B. ein Haltegurt für den Oberkörper) gesichert werden. Fragen Sie im Zweifel den Arzt, ob die Sitzhose eine geeignete Maßnahme zur Sicherung des Patienten ist.

4. Montage

1. Breiten Sie die SITZHOSE M bzw. SITZHOSE XL wie in **Abb. 1** gezeigt auf der Sitzfläche des Rollstuhls aus. Die Unterseite der Sitzhose erkennen Sie an den aufgenähten Gurten.
2. Legen Sie die Gurte mit den Enden **1A** und **1B** jeweils um die Rückenlehnenrohre des Rollstuhls herum und verschließen Sie diese. Stellen Sie die Länge des Gurtes ein. Beachten Sie die Sicherheitshinweise hinsichtlich

einer eventuellen Verschraubung dieser Gurte am Rollstuhl.

- Der Patient setzt sich nun auf die Sitzhose. Die Halteelemente mit den inneren Gurten **AL** und **AR** dienen zur Fixierung des Patienten. Legen Sie die Halteelemente um die Beine des Patienten und verbinden Sie Ende **AR** mit **BL** bzw. **AL** mit **BR** (**Abb. 2**). Verstellen Sie die Gurte mit den Verstellclips auf die richtige Länge. Achten Sie auf korrekten Sitz, der den Patienten nicht einschnürt, aber auch nicht so viel Spielraum bietet, dass der Patient hin und her rutschen kann. Es ist sinnvoll, die Verstellung der Gurte **BL** und **BR** durch Stegschnallen (**ST**) zu sichern.
- Die Gurtenden **CL** und **CR** sind einerseits nähtechnisch erforderlich, bieten andererseits aber zusätzliche Befestigungspunkte durch Anschrauben oder Schlaufenlegung.



Abb. 1



Abb.2

5. Reinigung, Pflege und Lagerung:

Die Sitzhose ist waschbar bei 30° C mit Color-Waschmittel. Wir empfehlen Handwäsche. Die Sitzhose ist nicht trocknergeeignet. Es ist wichtig, alle Schlösser vor dem Waschvorgang zu schließen, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen aus hygienischen Gründen eine regelmäßige Reinigung der Sitzhose und den Einsatz der Sitzhose nur bei einem Patienten. Lagern Sie die Sitzhose in geschlossenen Räumen bei normaler Umgebungstemperatur und setzen Sie sie nicht dauerhaft direkter Sonneneinstrahlung aus. Überprüfen Sie, wie in den Sicherheitshinweisen angegeben, das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Ein beschädigtes Produkt darf nicht mehr verwendet werden. Die konkrete Lebensdauer des Produkts hängt sehr stark davon ab, welchen Einflüssen dieses im Laufe der Zeit ausgesetzt ist. Luftfeuchtigkeit, langfristige Sonneneinstrahlung, chemische Substanzen, unachtsamer Umgang können sich negativ auf die Lebensdauer auswirken. Auch bei äußerlicher Unversehrtheit empfehlen wir den Austausch der Sitzhosen nach spätestens 3 Jahren.

6. Technische Daten

SITZHOSE M: Gewicht ca. 0,26 kg, Größe 45,5 x 35,5 cm
SITZHOSE XL: Gewicht ca. 0,3 kg, Größe 48,5 x 45,5 cm
Material: Obere und untere Lage der Sitzhose: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Füllung: 100 % Polyester
Gurte, Nähte: 100 % Polyester
Etikett: 100 % Nylon
Verstellclip, Steckschloss: Kunststoff (POM)

7. Entsorgung:

Bitte entsorgen Sie die Sitzhose im Hausmüll.

Die Gewährleistung für dieses Produkt auf Material- und Verarbeitungsfehler beträgt in Verbindung mit dem Kauf-/Lieferbeleg 12 Monate. **Schäden durch unsachgemäße Behandlung sind hiervon ausgenommen.** Diese Anleitung ist Bestandteil einer jeden MPB-Sitzhose und muss daher aufbewahrt werden. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.

Als Zubehör zu einem Medizinprodukt der Klasse I trägt dieses Produkt eine CE Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745. Es entspricht daher allen auf das Produkt anzuwendenden regulatorischen Anforderungen. Bitte melden Sie im Zusammenhang mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle umgehend uns und den zuständigen Behörden.