

# Bedienungs- und Pflegeanleitung für Sitzkissen SIKI 38– SIKI 60



1. Alle MPB – Sitzkissen entsprechen in allen Punkten den gesetzlichen Bestimmungen. Es handelt sich um Qualitätsschaumstoff.
2. Die Sitzkissen-Bezüge sind durch Reißverschluss abnehmbar und bei 30° Grad waschbar. Bitte beachten Sie im Einzelnen das jeweils angenähte Pflegeetikett.
3. Nach dem ersten Waschen des Sitzkissen-Bezuges werden Sie feststellen, dass dieser geringfügig eingelaufen sein kann. Durch dieses geringfügige Einlaufen nach der Wäsche, sitzt der Bezug absolut stramm und faltenfrei auf dem Kissen.
4. Bitte beachten Sie, dass gefärbte Stoffe auch über die erste Wäsche hinaus „ausbluten“ können. Waschen Sie daher bitte den Kissenbezug ausschließlich mit gleichfarbiger Wäsche.
5. Aus hygienischen Gründen sollte ein Kissen immer nur für einen Patienten eingesetzt werden. Bei einer vorliegenden Inkontinenz muss das Kissen z. B. mit dem MPB – Artikel „SCHUTZBEZUG L“ oder „SCHUTZBEZUG XL“ vor eindringenden Flüssigkeiten geschützt werden.
6. Die Sitzkissen SIKI werden einfach auf den Rollstuhlsitz oder Stuhl gelegt.
7. Um ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl oder auf dem Stuhl zu vermeiden, können Sie z.B. unseren Artikel Kissen ANTIRUTSCH verwenden.



**Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden!**



**Wenden Sie das Kissen regelmäßig, um eine gleichmäßige Belastung zu gewährleisten.**

**Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB® Sitzkissens SIKI und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.**