

# Montage- und Bedienungsanleitung für SMARTPHONE-/ TABLETHALTER TR

## Sicherheitshinweise – safety advice – avis de sécurité

- ⚠ Bitte diese Montage- und Gebrauchsanweisung unbedingt lesen und beachten!
- ⚠ Plastiktüten können gefährlich sein! Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Verpackungstüte von Säuglingen und Kleinkindern fern!
- ⚠ It is essential for you to read and pay attention to the assembly- and operating instructions!
- ⚠ Plastic bags may be hazardous! Please keep the packaging bag out of reach of babies and toddlers in order to prevent danger of suffocation!
- ⚠ Il faut absolument lire et observer ce mode d'assemblage et d'emploi, s. v. p. !
- ⚠ Les sacs en plastique peuvent être dangereux ! Afin de éviter le danger d'étouffer, veuillez tenir le sac d'emballage à l'écart des bébés et des enfants en bas âge, s.v.p.!


### Inhalt :



**Achtung:** Der Befestigungskloben muss so angebracht werden, dass Funktionen der Bremsen, Klingel, Stockhalter, Lampe, etc. nicht beeinträchtigt werden.

**Abb. 1**

Standard-Rollator mit Rohrdurchmesser 22 oder 25 mm

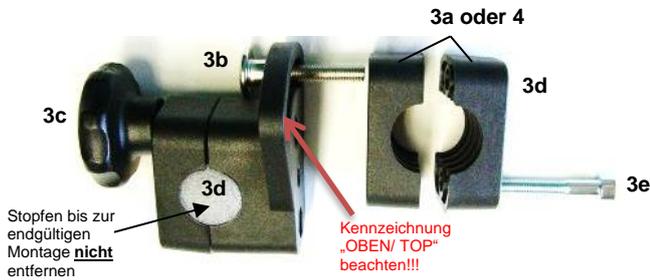


Montage so hoch wie möglich auf angerauter Fläche



**Abb. 2**

Troja Ecco, Gemino, Volito, Topas Premium und andere mit gleichem ovalem Rohr

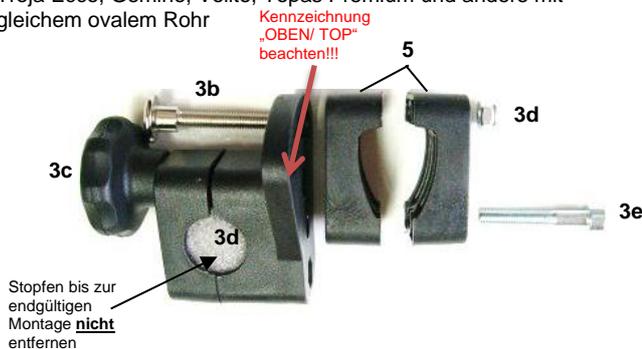

Montage so hoch wie möglich direkt unterhalb des Bremsgriffes!




**Achtung:** Bei der Montage dieser Modelle kann es durch die Schrauben zu einer geringfügigen, unvermeidbaren Oberflächen-Beschädigung kommen, die aber bei montiertem Kloben unsichtbar ist und bleibt. Verschieben Sie den Kloben im montierten Zustand **nicht** auf dem Rohr (Gefahr von Kratzspuren)!



**Abb. 3**

Waagerechte Montage an Rollstühlen und Rollatoren wie Magic, Polo, etc. mit Rohrdurchmesser 22 oder 25 mm

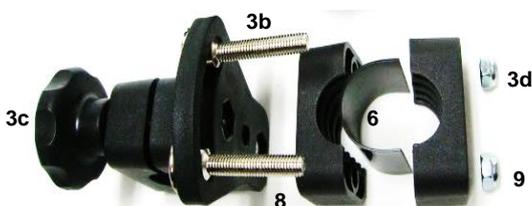

**Magic, Rebotec Polo**



**Rollstuhl**



Bevor Sie den Smartphone-/ Tablethalter in Gebrauch nehmen, müssen Sie noch den beiliegenden Schwanenhalsadapter (1) montieren. Lösen Sie hierfür die Schrauben mit dem Sechskantschlüssel und stecken ihn auf den kleinen schwarzen Zapfen wie in **Abb. 5 + 6** gezeigt. Sie können ihn nach der Endmontage am Rollator noch jederzeit passend ausrichten (**Abb. 8 + 11**).

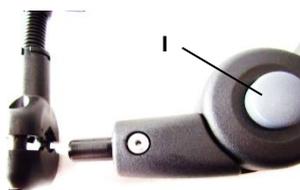


Abb. 5



Abb. 6

Nach Entfernen des grauen Schaumstoffstopfens stecken Sie den Zapfen (**Abb. 7 F**) des Smartphone-/ Tablethalters (**2**) in die Klemmeinheit des Klobens (**Abb. 1 - 3 + 7**) und ziehen das Handrad (**3 c**) kraftschlüssig fest. Der Halter ist nun montiert.

Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren.

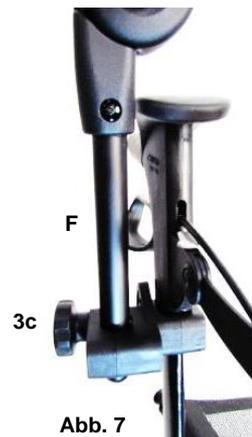


Abb. 7

### Montage Smartphonehalter :



Abb. 8

Stecken Sie den Smartphonehalter (**9**) auf den Schwanenhalsadapter (**Abb. 9**). Zur sicheren Befestigung des Smartphone können Sie es zusätzlich mit dem Gummi sichern (**Abb. 10**).

**Sowohl für Smartphonehalter, als auch für Tablethalter liegen zusätzliche Anleitungen des Herstellers bei! Wir bitten um Beachtung!**



Abb. 9



Abb. 10

### Montage Padhalter :



Abb. 11

Stellen Sie erst den Tablethalter (**10**) auf die Größe Ihres Tablets ein (**Abb. 12**). Stecken Sie dann den Tablethalter auf den Schwanenhalsadapter (**Abb. 13**).



Abb. 12



Abb. 13



Abb. 14

Durch Drücken der grauen Verriegelungsknöpfe an den Knickgelenken (**H und I**) können Sie den Smartphone-/ Tablethalter in verschiedene Positionen bringen. Durch leichte Drehung des Einsteckzapfens (**F**) in der Klemmeinheit kann die Position zusätzlich stufenlos verändert werden. Lösen Sie dazu das Handrad (**3c**) und drehen es nach dem Verstellen wieder fest.

### Sicherheitshinweise :

Die Halteschalen für Smartphone, bzw. Tablet müssen in einem Winkel von 30° bis 90° montiert werden, auf keinen Fall in waagerechter Position, da das Gerät sonst herausrutschen und beschädigt werden kann.

Setzen Sie das Produkt nicht zu hoher Sonneneinstrahlung aus. Die Funktion kann dadurch beeinflusst werden.

Reinigen Sie das Produkt mit lauwarmem Wasser unter Zusatz eines neutralen Spülmittels. Verwenden Sie keinen Alkohol oder Reiniger, die eine andere entflammable Flüssigkeit enthalten.



**Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann, bzw. Kundendienst vorgenommen werden.**

**Diese Anleitung ist Bestandteil jedes MPB® SMARTPHONE-/ TABLETHALTER TR und muss daher aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist die Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.**