

Montage- und Bedienungsanleitung für Stockhalter SNAP 1, SNAP 2 und SNAP 10



SNAP 1



SNAP 2



SNAP 10

1. Die Stockhalter SNAP 1, SNAP 2 und SNAP 10 passen für annähernd alle Rollstühle herkömmlicher Bauart, bei denen das senkrechte Rückenrohr im 90 Grad Winkel auf das untere Konstruktionsrohr (meist am Ende mit Auftrittkappe) trifft.
2. Die Stockhalter SNAP 1 und SNAP 10 werden von oben in den rechten Winkel geklemmt, der Stockhalter SNAP 2 wird seitlich am rechten Winkel angeklemt.
3. Die Stockhalter SNAP 1 und SNAP 2 verfügen über jeweils 2 Klemmen für 22 – 25 mm Rohre, der Stockhalter SNAP 10 ist entsprechend der bestellten Klemmgröße für die Rohrdurchmesser 21/22, 25/26 und 31/32 mm, auch im Mix, einsetzbar.
4. Bei den Stockhaltern sind die jeweils erforderlichen Klemmen entsprechend der Befestigungsmöglichkeit am Rollstuhl in die entsprechenden Halterungen des Stockhalters fest einzuschieben.
5. Klemmen Sie zunächst die senkrechte Schelle, dann die waagerechte Schelle an und vergewissern Sie sich, dass beide Klemmen fest das Rohr umschließen.
6. Der Stockhaltebecher ist jetzt fest verdrehsicher montiert.
7. Montieren Sie als Letztes den beigegefügt Stockhaltegurt möglichst an der oberen Schraube der Rückenlehnenbespannung. Stellen Sie das verstellbare Schloss so ein, dass die Krücken oben sicher und schlenkerfrei gehalten werden. Schneiden Sie ein eventuell zu langes Gurtende mit einer scharfen Schere gerade ab und versiegeln Sie die Schnittstelle mit einer Feuerzeugflamme.

Bedienungsanleitung: Stellen Sie Ihre Gehstöcke unten in den Stockhalter und fixieren Sie sie oben mittels des Haltegurtes.



Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann, bzw. Kundendienst vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB ®Stockhalters SNAP 1, SNAP 2 und SNAP 10 und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.