

Montage- und Bedienungsanleitung für SPEICHENSCHUTZ



Speichenschutz 22
Speichenschutz 24



Speichenschutz 22 U
Speichenschutz 24 U



Speichenschutz
24 EASY



Speichenschutz 24
EASY S, bzw. W

1. Die genaue Auswahl des passenden SPEICHENSCHUTZES ist Voraussetzung für dessen optimale Funktion. Bitte suchen Sie gemäß der Radgröße und der Greifreifenbefestigung den passenden SPEICHENSCHUTZ aus, damit ungewollter Finger- und Handkontakt mit den Speichen des Antriebsrades vermieden wird. Nur bei vollständig abgedeckten Speichen besteht auch vollständiger Schutz.
2. Setzen Sie den SPEICHENSCHUTZ 22 und 24 für Greifreifen-Flachlaschen- Befestigung, die Modelle 22 U und 24 U für Greifreifen mit sechs Ösen-Befestigungen ein. Der SPEICHENSCHUTZ 24 EASY deckt die Speichen in einem Durchmesser von 49 cm ab, wodurch sowohl Hand als auch Finger beim allgemeinen Gebrauch ausreichend geschützt sind. Aufgrund der Vielzahl von Antriebsrädern ist es möglich, dass der SPEICHENSCHUTZ bauseits geringfügig nachgearbeitet werden muss.
3. Bei allen SPEICHENSCHUTZ-Modellen mit Aussparungen drehen Sie bitte den SPEICHENSCHUTZ solange im Greifreifen, bis die Befestigungslöcher für die SPEICHENSCHUTZ-KLEMMEN genau über einer Speiche liegen.
4. Aufgrund der vielen verschiedenen Einspeichungsarten kann es dennoch passieren, dass kein Befestigungsloch über einer Speiche liegt. In einem solchen, zwar unwahrscheinlichen, aber dennoch möglichen Fall, bohren Sie bitte mit einem scharfen, für Kunststoff geeigneten 8 mm – 8,5 mm Bohrer drei Bohrungen in gleichen Abständen sternförmig in den SPEICHENSCHUTZ.
5. Klippen Sie dann mit den beigegeführten SPEICHENSCHUTZ-KLEMMEN den SPEICHENSCHUTZ an die Speichen. Drücken Sie von der Vorderseite mit dem Daumen auf die KLEMME und drücken Sie von hinten mit der anderen Hand gegen die Speiche.
6. Vergewissern Sie sich als Letztes, ob der SPEICHENSCHUTZ fest und klapperfrei auf den Speichen sitzt.

Pflegeanleitung:

Reinigen Sie den SPEICHENSCHUTZ mit einem leicht feuchten, sauberen Baumwolltuch, einem Fensterleder, einem Fenster- oder Mikrofasertuch. Da das Material kratzempfindlich ist, empfehlen wir groben Schmutz vorher unter Verwendung von viel Wasser (Gartenschlauch oder Gießkanne) abzuwaschen.

Die Reinigung kann mit milden Spülmitteln und mit allen für PET und ABS zugelassenen Reinigern erfolgen.

Wichtiger Hinweis:



Bei sehr niedrigen Temperaturen sowie bei extremen Belastungen wie z. B. Zusammenstößen beim Rollstuhlsport kann der SPEICHENSCHUTZ trotz bester Materialauswahl brechen. **Beschädigter oder gebrochener SPEICHENSCHUTZ darf nicht weiter verwandt werden, er ist aus Sicherheitsgründen sofort vollständig zu entfernen und gegen einen neuen SPEICHENSCHUTZ auszutauschen.**

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden **MPB ®SPEICHENSCHUTZes** und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.