

# Montage- und Bedienungsanleitung für

## BORDSTEINHILFE L oder R

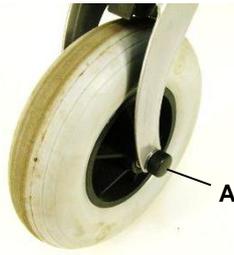


Abb. 1



Abb. 2

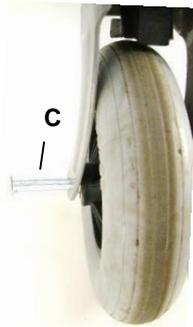


Abb. 3

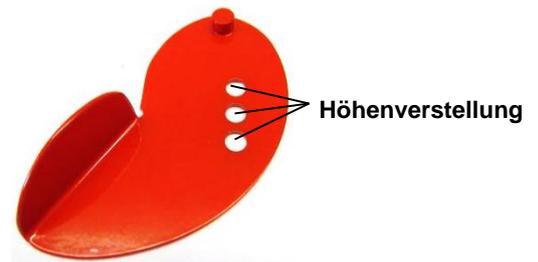


Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6  
Bordsteinhilfe L



Abb. 7  
Bordsteinhilfe R

Mit dieser universellen, preiswerten Kipphilfe für Standard-Rollatoren können Sie leicht Bordsteine oder ähnliche Hindernisse überwinden. Bestehend aus stabilem, rostfreiem Edelstahl, signalrot beschichtet, ist die Bordsteinhilfe in 3 Höhen/ Winkeln montierbar.



Der sichere Stand auf einem Bein bei Anwendung der Bordsteinhilfe muss gewährleistet sein.



Vorsicht bei Regen, Schnee oder Eis! Der Untergrund oder die Bordsteinhilfe könnten rutschig sein!

### Fachmännische Montage:

1. Entfernen Sie die Schutzkappe der Mutter (wenn vorhanden) (**Abb. 1 A**) am Hinterrad (je nach Bordsteinhilfe-Modell rechts oder links) und lösen Sie die Mutter (**Abb. 2 B**).
2. Ziehen Sie die Schraube, die Gabel und Rad verbindet, ein kleines Stück heraus (**Abb. 3 C**) und stecken Sie die Bordsteinhilfe an der Innenseite des Rollators zwischen Rad und Gabel. Hier haben Sie drei Möglichkeiten, die Kipphilfe-Höhe/ Winkel einzustellen (**Abb. 4+5**).
3. Anschließend schieben Sie die Schraube durch Bordsteinhilfe und Gabel (**Abb. 5**), setzen die neue mitgelieferte Mutter auf und schrauben das Ganze fest. Zum Schluss wird die Schutzkappe (wenn vorhanden) wieder aufgesteckt. Die Bordsteinhilfe ist nun montiert und gebrauchsfertig (**Abb. 6** linksseitig, **Abb. 7** rechtsseitig).



**Sollte der Kunststoffring in der Sicherungsmutter die Schraube nicht mehr ganz umschließen, muss eine 5 mm längere Schraube verwendet werden. In der Regel reicht eine der beiden mitgelieferten Sechskantschrauben dafür aus.**

### Gebrauch:

Fahren Sie mit Ihrem Rollator möglichst gerade an den Bordstein heran. Mit dem rechten, bzw. linken Fuß (je nach Bordsteinhilfe-Modell) wird nun die Bordsteinhilfe vorsichtig nach unten gedrückt, so dass sich die Vorderräder über die Bordsteinkante heben. Anschließend wird der Rollator langsam geradeaus geschoben, bis auch die Hinterräder den Bordstein erreichen. Der Rollator muss nun hinten nur noch leicht angehoben werden, bis auch die Hinterräder den Bordstein überwunden haben.



**Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden!**

Diese Anleitung ist Bestandteil einer jeden **MPB® BORDSTEINHILFE L oder R** und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.