


# Montage- und Bedienungsanleitung

## STOCKHALTER UNIVERSAL 22 und 25

Unser Stockhalter **UNIVERSAL 22** bzw. **25** ist für die waagerechte oder senkrechte Montage am Rückenrohr oder Auftrittrohr eines Rollstuhls geeignet. Er setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:

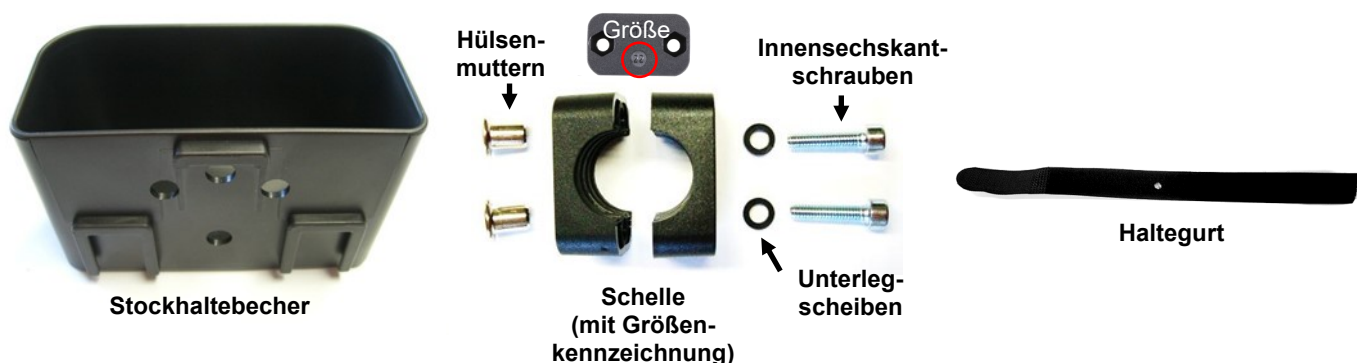

### Montage:



Montage an einem senkrechten Rohr



Montage an einem waagerechten Rohr

1. Stecken Sie die beiden Hülsenmuttern von innen in die Löcher des Stockhaltebeckers. Wählen Sie die passenden Löcher danach aus, ob Sie den Becher waagerecht oder senkrecht montieren wollen.
2. Befestigen Sie nun den Stockhaltebecher mit der beigefügten **Schelle 22** bzw. **25** (je nach Modellvariante), den Unterlegscheiben und den Schrauben am Rückenrohr oder am waagerechten Auftrittrohr. Ohne Verwendung der Unterlegscheiben kann sich der Stockhalter auf dem Rohr drehen!
3. Sollten Sie den Stockhalter an einem waagerechten Rohr befestigen, so ist es empfehlenswert, in die Schelle ein Stück Gummi (z. B. ein Stück von einem alten Schlauch) einzulegen, um so ein Drehen auf dem Rohr zu verhindern.
4. Befestigen Sie den beigefügten Haltegurt an der obersten Schraube der Rückenlehnenbespannung.

### Bedienung:

Stellen Sie Ihren Gehstock unten in den Stockhaltebecher und fixieren Sie ihn oben mit dem Haltegurt.

### Sicherheitshinweise:

1. Der Stockhaltebecher passt nur an Rundrohre mit 22 bzw. 25 mm Durchmesser (je nach Modellvariante). Er ist nicht für andere Rohrdurchmesser oder ovale Rohre geeignet.
2. Kontrollieren Sie vor Gebrauch den korrekten Sitz des Stockhalters. Bringen Sie den Stockhalter so an, dass er keine sicherheitsrelevanten Teile des Rollstuhls beeinträchtigt, z.B. Bremsen. Achten Sie darauf, dass der Haltegurt fest verschlossen ist.
3. Kontrollieren Sie den Stockhalter regelmäßig auf Beschädigungen. Der Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann bzw. Kundendienst vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden **MPB Stockhalters UNIVERSAL** und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.