

ROLLATORSCHIRM 99

⚠ Bitte diese Montageanleitung mit Sicherheitshinweisen unbedingt vor Montage lesen und beachten!

⚠ Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Verpackungstüte von Säuglingen und Kleinkindern fern!

Vielen Dank für den Kauf Ihres MPB-Rollatorschirms aus Bielefeld. Wenn Sie genau nach der vorliegenden Montageanleitung vorgehen, können Sie uneingeschränkt auf die beste Qualität und einfachste Handhabung dieses Original-Produktes vertrauen.

Alle Original-MPB-Rollatorschirme schützen Sie optimal vor Regen und Sonne, sie blockieren die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig. Das patente Air-Vent-System sorgt für eine weitgehende Entlastung und zusätzliche Stabilität bei windigem Wetter. Mit unserem Kloben 99 können die MPB-Rollatorschirme an jedem gängigen Rollator oder auch Rollstuhl an senkrechten oder waagerechten Rohren montiert werden. Durch den platzsparenden Anbau vornehmlich am Griffrohr der rechten Seite können Sie Ihren Rollator oder Rollstuhl sicher mit beiden Händen nutzen, ohne dass Sie bei weiteren Zubehörteilen eingeschränkt werden.

Rollatorschirme sind für s.g. Delta-Gehräder nicht geeignet!

Inhalt der Verpackung: Rollatorschirm (Abb. 1), vormontierter Befestigungskloben (Abb. 2), Zubehörbeutel mit Befestigungsmaterial (Abb. 3).



Abb. 1: Rollatorschirm

Schirmstange mit zwei Verstellgelenken, Schirm und Schirmhülle

1a: Verstellring

1b: Verstellgelenke

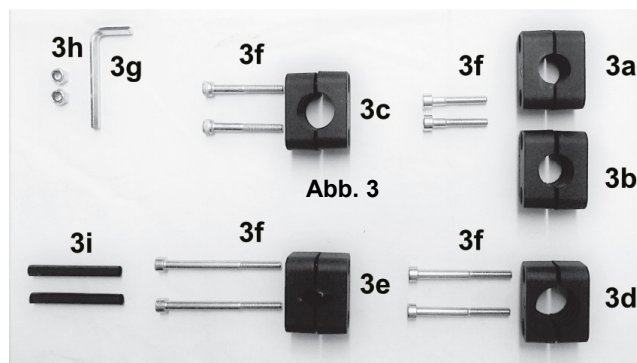


Abb. 3: Zubehörbeutel mit Befestigungsmaterial

3a: 1 x Schelle 18 mm

3b: 1 x Schelle 20 mm

3c: 1 x Schelle 22 mm

3d: 1 x Schelle 25 mm

3e: 1 x Multischelle für versch. Ovalrohre

3f: je 2 x Innensechskantschrauben M6 x 35, 40, 60 und 75

3g: 1 x Innensechskantschlüssel SW5

3h: 2 x Sicherungsmutter M6

3i: 2 x Kunststoff-Gewindeabdeckung

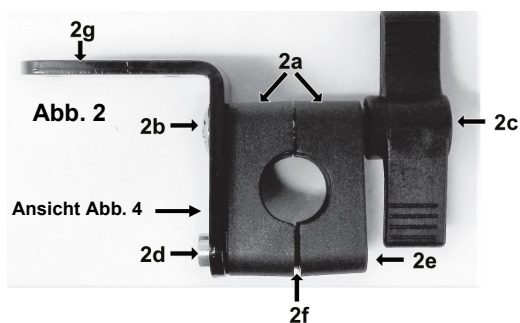


Abb. 2: Vormontierter Befestigungskloben

Der Kloben ist vormontiert für die Montage rechts (7°).

2a: Schelle 20 mm

2b: Schlossschraube M6 x 55

2c: Flügelgriff mit Mutter

2d: Innensechskantschraube M6 x 40

2e: Sicherungsmutter M6

2f: Kunststoff-Unterlegscheibe

2g: Befestigungswinkel

Abb. 4

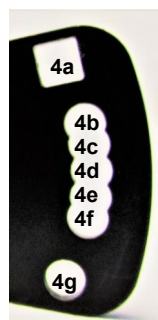


Abb. 4: Kulisse des Befestigungsklobens (Innenwinkel)

Position der Schrauben bei verschiedenen Winkeln:

4a: Position Schlossschraube waagerechte Montage

4b: Position Innensechskantschraube 12,5° rechts

4c: Position Innensechskantschraube 7° rechts

4d: Position Innensechskantschraube 0°

4e: Position Innensechskantschraube 7° links

4f: Position Innensechskantschraube 12,5° links

4g: Position Innensechskantschraube waagerechte Montage

Der Befestigungskloben ist so vormontiert, dass Sie ihn auf der rechten Seite eines Rollators mit etwa 7°-Rohrneigung anbringen können (Innensechskantschraube in Position **4c**, **Abb. 4**). Wenn Sie einen anderen Winkel einstellen oder den Kloben auf der linken Seite anbringen wollen, so müssen Sie die Innensechskantschraube (**2d**) in der Kulisse versetzen. In **Abb. 4** sind verschiedene Positionen dargestellt. Die äußeren Kulissenlöcher **4a** und **4g** dienen entweder zur Einstellung eines extremen Winkels (ca. 30°) oder zur Montage an einem waagerechten Rohr. Bei einem waagerechten Rohr müssen Sie die in **Abb. 2** abgebildete Schelle **2a** um 90° drehen, indem Sie die Schlossschraube **2b** und die Innensechskantschraube **2d** in die Kulissenlöcher **4a** bzw. **4g** (**Abb. 4**) versetzen. **Abb. 5** und **6** zeigen Ihnen Montagebeispiele des Klobens.

Wählen Sie für die Montage am Rohr des Rollators bzw. Rollstuhls die passenden Schellen und Schrauben aus dem Zubehörbeutel aus. Sie können auch verschiedene Halbschellen - je nach Rohrform - kombinieren. Montieren Sie die Aufnahmeschelle (**2a**) für den Schirm immer an der Außenseite des Rollators oder Rollstuhls. Die Halterung sollte bei Rollatoren so weit oben wie möglich unterhalb des Bremsgriffs sitzen. Falls Sie die Innensechskantschraube am vormontierten Kloben versetzt haben, denken Sie bitte unbedingt daran, die naturfarbene Unterlegscheibe (**2f**) wieder zwischen die Halbschellen zu legen. Das erleichtert Ihnen das Einstecken des Schirmgestänges. Nach der Montage am Rohr (**Abb. 5, 6**) sollten die Schrauben **3f** bestenfalls 2 mm und gleich weit aus dem schwarzen Winkel herauschauen. Ziehen Sie die Schrauben gut fest und ziehen Sie sie nach ca. 2 Tagen nach. Die evtl. sichtbaren Schraubengewinde können Sie mit den schwarzen Kunststoffröhrchen abdecken. Schneiden Sie diese ggfs. mit einer Schere auf die passende Länge und schlitzen Sie sie mit einem scharfen Messer seitlich auf. Danach können Sie die Röhrchen auch nachträglich über die Schraubengewinde ziehen.

Montage, Sicherheitshinweise

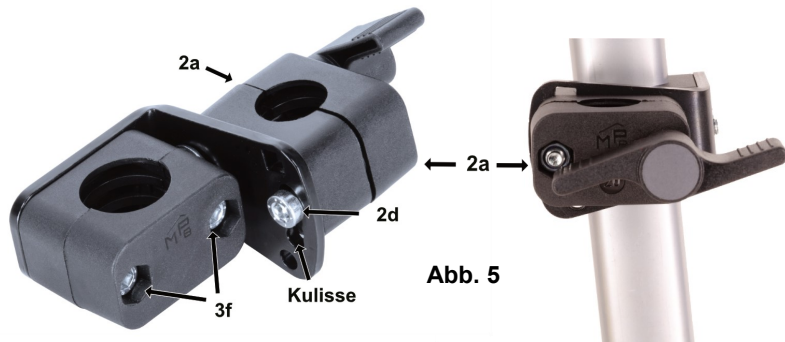


Abb. 5

Abb. 5: Kompaktkloben 99, Montagebeispiel
Nach der Montage der Schellen (3a-d) mit den Schrauben 3f aus dem Zubehörbeutel (Abb. 3) ergibt sich ein kompakter Kloben. Das Beispiel zeigt den Kloben eingestellt auf die Montage rechts an 7°-Rohren.

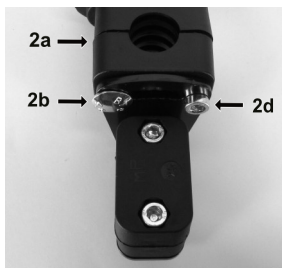


Abb. 6

Abb. 6: Kloben 99, waagerechte Montage
Das Beispiel zeigt die Position der Schrauben 2b und 2d in der Kulisse bei Montage an waagerechten Rohren. Die Schelle 2a wird dazu um 90° gedreht.

Sie können nun die Schirmstange in die Aufnahmeschelle (2a) mit dem Flügelgriff (2c) einsetzen. Mit dem Verstellring (1a) können Sie die von Ihnen gewünschte Höhe einstellen und den Schirm sichern. Durch die lange, einstellbare Aufnahmestange ist eine Nutzung des Schirms auch für Personen mit einer Größe bis zu ca. 200 cm möglich. Entfernen Sie nun die Schutzhülle. Bringen Sie Ihren Schirm durch Drücken des grauen Arretierungsknopfes an den Verstellgelenken (1b) in die gewünschte Position. Durch Festziehen des Flügelgriffs können Sie Ihren Schirm einfach gegen Verdrehen sichern.

Öffnen Sie die Klettgurte der Schirmbespannung und drücken Sie den Öffnungsknopf des Schirmes. Der Schirm öffnet sehr schnell – bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

Nach Nutzung des Schirms rollen Sie den zwischenzeitig getrockneten Schirm wieder ein und verfahren Sie ansonsten in umgekehrter Reihenfolge.

SICHERHEITSHINWEISE:

Der Schirm muss so angebracht werden, dass der Faltmechanismus des Rollators oder Rollstuhls und die Funktion wichtiger Teile (z.B. Bremsen) nicht eingeschränkt werden.

Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren.

Der Schirm öffnet sich sehr schnell automatisch auf Knopfdruck. Halten Sie ihn vom Körper entfernt und achten Sie auf andere Personen in der Nähe, um Verletzungen zu vermeiden.

Beim Öffnen und bei geöffnetem Schirm besteht Verletzungsgefahr anderer durch die äußeren Schirmspitzen an den Enden der Schirmbespannung. Beim Einklappen des Schirmes und des Halters in umgekehrter Reihenfolge besteht konstruktionsbedingt Klemmgefahr für die Finger in den Knickgelenken.

Mit einem Rollatorschirm nehmen Sie mehr Raum ein. Beachten Sie bei geöffnetem Schirm, dass Sie mit diesem seitlich rechts und links hängen bleiben können. Achten Sie auch auf die Gesamthöhe, damit Sie nicht z.B. mit ausgefahrenen Markisen kollidieren. Vor dem Einfahren in Gebäude ist der Schirm zu schließen und herunterzuklappen.

Jeder Schirm bietet dem Wind Angriffsfläche. Benutzen Sie daher den aufgespannten Schirm auf keinen Fall bei Wind und Böen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie der aufgespannte Schirm beim Fahren mit dem Rollator bzw. Rollstuhl negativ beeinflusst, so klappen Sie den Schirm sofort wieder ein, um Unfälle zu vermeiden.

Klappen Sie den Schirm bei Nichtgebrauch ein. Sichern Sie die hochwertige, trockene Stoffbespannung des Schirmes durch Eindrehen und Schließen des Klettverschluss-Bandes und Nutzung der Schirmhülle. Achten Sie darauf, dass der Schirm nicht an Gegenständen und Hindernissen schleifen kann.

Achten Sie bei der Benutzung stets auf ein gut einsehbares, freies Sichtfeld. Behindern Sie andere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer nicht. Bevor Sie den Schirm zum ersten Mal bei Regen benutzen, üben Sie bitte das Öffnen und Schließen mehrfach. Rollen Sie nur vollständig getrocknete Schirme ein und ziehen dann die Schirmhülle über, da es ansonsten zu Stockflecken und/oder Verfärbungen der Bespannung kommen kann.

Vermeiden Sie den Kontakt des Schirms zu Gefahrenquellen wie Sträuchern, Hecken, Zäunen etc., da die Schirmbespannung dadurch beschädigt werden kann.

Vermeiden Sie jeglichen Scheuerkontakt, auch an Halterungsschraube, Griff der Höhenverstellung, Rollatorrahmen und Rädern.

Dieser Artikel darf in defektem Zustand nicht mehr eingesetzt werden. Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-MPB-Ersatzteilen durch einen Fachmann vorgenommen werden. Bei nicht mit uns abgestimmten Veränderungen am Produkt erlischt das Recht auf Gewährleistung!