

# Montageanleitung für ARMLEHNEN



Armlehne USI



Armlehne USI DS



Armlehne US



Armlehne UDS



Armlehne MY 235



Armlehne MY 275



Armlehne MY 365

1. Entfernen Sie die auszutauschende ARMLEHNE durch Abschrauben.
2. Setzen Sie eine neue, passende ARMLEHNE auf und befestigen Sie diese mit den vorhandenen Schrauben.
3. Ein Teil unserer Armlehnen verfügt über verschiedene Lochabstände, so dass in der Regel ein Lochabstand immer passt.
4. Bei der Vielzahl von Import-Rollstühlen kann es jedoch passieren, dass ein zusätzlicher Lochabstand benötigt wird. Alle integralgeschäumten ARMLEHNEN, das sind alle, bis auf die Modelle US und UDS, verfügen über eine stabile Holzeinlage, in die Sie auch die Befestigungsschraube AL eindrehen können, falls die vorgegebenen Abstände einmal nicht passen. Achten Sie dabei darauf, dass die Befestigungsschraube AL immer hinten zum Rückenrohr hin montiert wird!



**Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden!**

**Diese Anleitung ist Bestandteil einer jeden MPB® ARMLEHNE und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.**