

# Montage- und Bedienungsanleitung für RÜCKENGURT ST und RÜCKENGURT TR

## Inhalt:



## Im Zubehör- Beutel:



2



3

4



5

6

7



8

1 – 1 x Rückengurt

2 – 2 x Rückengurtplatte

3 – 4 x Sicherungsmutter M6

4 – 4 x Innensechskantschraube M6 x 40

5 – 2 x Befestigungsschelle KS 22 mm

6 – 2 x Befestigungsschelle KS 25 mm

7 – 2 x Befestigungsschelle KS oval (nur Modell TR)

8 – 1x Sechskantschlüssel SW5

## Montage:

Dieser Rückengurt kann mit wenigen Handgriffen an Ihren Rollator angebracht werden. Das Modell ST ist für Standard-Rollatoren mit einem Rohrdurchmesser von 22 mm bzw. 25 mm geeignet. Das Modell TR (alte Bezeichnung „85“) kann an Rollatoren mit 22 oder 25 mm Rohrdurchmesser sowie an die Rollatoren Topro Troja, Handicare Gemino oder Uniroll Topas Premium und Rollatoren mit gleichartigen Ovalrohren montiert werden. Bei der Montage an den Topro Troja empfehlen wir, die Schellen nach Anbringen der Halterung nicht mehr auf dem Rohr zu verschieben, um Beschädigungen durch die Schrauben zu vermeiden..

Je nach Rollatormodell wählen Sie bitte aus dem mitgelieferten Beutel die richtige Schellengröße und montieren die Rückengurtplatten am oberen Ausziehrrohr des Rollators. In **Abb. 1** sehen Sie, wie die Rückengurthalterung zusammengebaut wird. Wir empfehlen für optimalen Sitzkomfort, die Halterung so zu montieren, dass die Metallplatte nach außen zeigt (**Abb. 2**). In seltenen Fällen kann es durch störende Bremszüge oder andere Anbauten am Rollator notwendig sein, die Metallplatte nach innen zeigend zu montieren, wodurch der Sitzbereich am Rollator minimal verkleinert wird.



Linke Seite

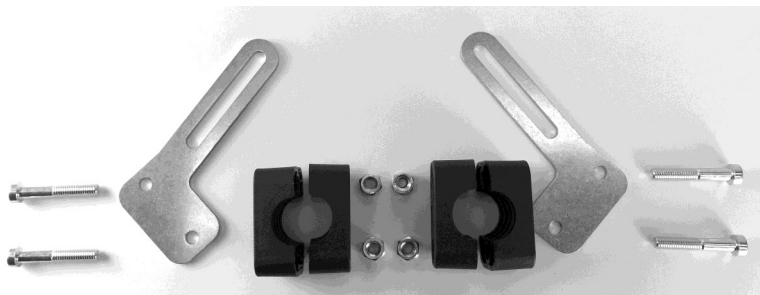


Abb. 1



Rechte Seite

# RÜCKENGURT ST und TR



**Abb. 2: Anbau des Rückengurts am Rollator (die Rückengurtplatte zeigt nach außen)**

Nach Montage der Halterungen ziehen Sie bitte den Rückengurt (1) durch die Schlitze der Rückengurtplatten (**Abb. 2**). Achten Sie dabei darauf, dass der Klettbereich nach außen zeigt. Nun können Sie den Gurtbereich mit Hilfe des Klettverschlusses individuell auf Ihre Bedürfnisse stufenlos anpassen. Bitte beachten Sie, dass der Rückengurt, so wie in der **Abb.2** gezeigt, relativ waagrecht angebracht wird. Wenn der Rückengurt zu weit herunterhängt, besteht die Gefahr, dass Sie beim Anlehnen keine ausreichende Auflagefläche haben und schlimmstenfalls nach hinten stürzen.

**Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Nutzung des Rückengurtes gründlich durch und befolgen Sie alle Hinweise.**

**Überprüfen Sie vor Gebrauch den festen Sitz der Halterung. Ein nicht korrekt montierter Rückengurt kann zu Unfällen führen. Bitte ziehen Sie die Schrauben in regelmäßigen Abständen nach.**

**Stellen Sie immer zunächst die Feststellbremse fest, bevor Sie sich setzen, damit Ihr Rollator nicht wegrollen kann.**

**Der Klettbereich des Gurtes muss nach außen zeigen, um ein Haften an der Kleidung zu vermeiden.**

**Der Rückengurt muss relativ waagrecht montiert werden, um eine ausreichende Auflagefläche beim Lehnen nach hinten zu bieten. Ansonsten ist ein Abkippen nach hinten möglich!**

**Wir empfehlen die Montage durch Fachpersonal.**

**Ein defekter Rückengurt darf nicht mehr eingesetzt werden. Zur Reparatur dürfen nur Original-Ersatzteile durch einen Fachmann verwendet werden.**

**Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB® RÜCKENGURTS und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.**